

ACTIMAR FIALOIDI 15 FIALOIDI DA 5 ML

Marchio: ACTIMAR
Codice Min.: 971975572
Link: [clicca qui per acquistare](#)



ACTIMAR FIALOIDI Descrizione Soluzione salina ipertonica per uso inalatorio a base di: acido ialuronico ad alto peso molecolare, sodio cloruro 3%, sodio bicarbonato. Consigliato per un'igiene quotidiana delle fosse nasali. È utile in caso di raffreddori, riniti di tipo allergico e non, rinosinusiti nonché in tutti quei casi in cui è richiesta una decongestione nasale oppure in presenza di una compromessa clearance mucociliare. Coadiuvante nella prevenzione e nella terapia delle otiti

medie in cui si ravvisi l'utilità di una miglior ventilazione delle vie aeree superiori. Actimar non contiene conservanti. Modalità d'uso Irrigazione diretta: -Spezzare con movimento rotatorio il tappo del fialoide. -Tenere la testa inclinata da un lato, mai all'indietro. -Accostare delicatamente il beccuccio del flaconcino alla narice nasale superiore e premere leggermente per irrorare. -Tenere la testa inclinata dall'altro lato (mai all'indietro) e ripetere l'irrorazione nell'altra narice. -Il contenitore può essere richiuso capovolgendo e premendo il tappo sulla bocca della fiala. Posologia: irrorare con mezza fiala per narice 2-3 volte al giorno o più spesso al bisogno o secondo parere medico. Terapia inalatoria: Actimar può essere utilizzato anche in caso di terapia inalatoria a carico delle alte vie aeree: in questo caso utilizzare gli appositi dispositivi inalatori che ne garantiscano la corretta nebulizzazione e seguire le indicazioni dell'apparecchio scelto. Posologia: una fiala, 1-2 volte al giorno o secondo parere medico. Avvertenze Conservare le istruzioni interne insieme al prodotto. Utilizzare il prodotto per terapie inalatorie solo a carico delle alte vie aeree. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini al fine di evitare uno scorretto uso del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi. Non destinato ad uso orale. Non iniettabile. L'utilizzo da parte di più soggetti di una stessa fiala può pregiudicarne l'efficacia e può essere causa dell'aggravarsi dei problemi esistenti nonché causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti. Non utilizzare in casi di ipersensibilità individuale verso uno o più componenti del prodotto. Non utilizzare in casi di epistassi in corso o appena conclusa, né in caso di mucosa nasale non integra. L'inalazione di una soluzione salina ipertonica in pazienti particolarmente sensibili potrebbe provocare episodi di broncospasmo: in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. In caso di reazioni avverse sospendere l'utilizzo del prodotto e contattare il medico. Non utilizzare in caso di contaminazione accidentale dopo apertura. Il fumo potrebbe compromettere l'effetto protettivo dell'acido ialuronico. L'uso del presente dispositivo medico non sostituisce altri trattamenti prescritti dal proprio Medico. Non sono stati condotti studi di interazione tra Actimar fiale ed altre sostanze e/o farmaci. Pertanto, nei casi in cui si volesse procedere ad associare Actimar fialoidi con altre sostanze e/o farmaci, è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni del proprio medico e le

istruzioni d'uso del prodotto utilizzato in associazione con Actimar fiale. Non utilizzare il prodotto in associazioni con composti quaternari. La non corretta osservanza delle avvertenze e modalità d'uso potrebbero pregiudicare l'efficacia del prodotto o essere cause dell'aggravarsi dei problemi esistenti nonché causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti. Conservazione Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità post-apertura: 12 ore. Formato 15 fialoidi richiudibili da 5 ml.