

ALGASIV ADESIVO PER PROTESI DENTARIA SUPERIORE 30 PEZZI

Marchio: ALGASIV
Codice Min.: 980644328
Link: [clicca qui per acquistare](#)



ALGASIV 30 CUSCINETTI ADESIVI Dentiera Superiore Descrizione Cuscinetti adesivi. Bloccano la dentiera tutto il giorno. Non serve riapplicare. Protegge le gengive dalle irritazioni. Facile da togliere, non lascia residui. Modalità d'uso Applicare il cuscinetto asciutto sulla dentiera pulita. Se è troppo largo, ritagliare la parte eccedente. Se il cuscinetto superiore presentasse sul retro delle piccole grinze, ritagliare una "V" simile al fronte. Quando la misura è esatta, tagliare tutti i cuscinetti, della confezione, utilizzando il primo come sagoma. Applicare il cuscinetto con il lato di colore rosa sulla dentiera. Inumidire leggermente il cuscinetto con poche gocce d'acqua o con le dita bagnate, senza inzupparlo. Inserire la dentiera nella sua sede e tenere premuto per circa 5 secondi fino a quando la sentite ben salda. Per toglierlo è sufficiente sollevarne un lato ed

estrarlo. Cambiare il cuscinetto ogni giorno. Componenti Fabric (cellulose acetate and rayon), PEG-90M, cellulose gum, algin, chlorophyllin-copper complex, CI 16035. Avvertenze Non usare il prodotto se avete avuto episodi di soffocamento o problemi di deglutizione. Sospendere l'uso se insorgono irritazioni. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Cuscinetti monouso: non riutilizzare. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione da 30 pezzi. Cod. 050