

ALUNEB MAD NASAL ATOMIZZATORE NASALE 3 ML

Marchio: -
Codice Min.: 935569638
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Aluneb MAD Nasal Aluneb MAD Nasal è un dispositivo medico, senza ago, per la nebulizzazione di soluzioni topiche per via nasale. Permette di effettuare trattamenti topici delle cavità nasali e sinusali, e consente la somministrazione rapida della soluzione Aluneb tramite nebulizzazione in particelle di grandezza di 30-100 micron di diametro ideali per la

terapia delle vie aeree superiori. MAD Nasal è un dispositivo utilizzato, in ambito pre-ospedaliero e pronto soccorso, per la somministrazione di anestetici, anticonvulsivi e antidolorifici per via intranasale. Grazie al suo adattatore conico morbido garantisce la tenuta sulla narice e si adatta in modo ergonomico alle narici di adulti e bambini. Il sondino malleabile consente un posizionamento a 180° dell'adattatore conico. Modalità d'uso Scollegare il dispositivo MAD Nasal svitandolo dalla siringa in dotazione. Aprire il flaconcino Aluneb monodose ruotando le alette. Collegare il flaconcino alla siringa ed aspirare metà della soluzione contenuta nel flaconcino. Fissare il MAD Nasal avvitandolo alla siringa. Inserire la punta del MAD Nasal in una narice. Mantenere il busto in posizione eretta. Spingere energicamente il pistone della siringa per nebulizzare la soluzione. Ripetere le operazioni, dal punto 3 al punto 5, anche per l'altra narice. Pulizia E' indicato per l'uso da parte di un solo paziente, ma può essere utilizzato più volte. Per questo motivo, è molto importante un'attenta pulizia del dispositivo dopo ogni utilizzo al fine di assicurare la durata e il buon funzionamento. Lavare MAD Nasal sotto l'acqua corrente tiepida. Prima di riporre MAD Nasal asciugarlo accuratamente con un panno morbido o con un getto d'aria calda. Avvertenze Dispositivo medico CE. Indicato per bambini e adulti. Formato L'astuccio contiene 1 dispositivo per l'atomizzazione nasale MAD Nasal, 1 siringa Luer Lock da 3 ml (senza ago). Cod. 024100