

BENDA ALL'OSSIDO DI ZINCO PER IL TRATTAMENTO DELLE ULCERE VARICOSE DI TIPO SECCO E DELLE DERMATITI CRONICHE VISCOPASTE PB7 600X7,5CM

Marchio: -
Codice Min.: 909267419
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Viscopaste PB7 BENDAGGIO COMPRESSIVO ALL'OSSIDO DI ZINCO Modalità d'uso: dopo essere stato rimosso dall'involucro da cui é protetto e dalla carta in cui é avvolto il prodotto é pronto per l'uso. Il bendaggio puó essere applicato in due modi: - iniziando dalle teste metatarsali, il bendaggio dovrebbe avvolgere delicatamente piede, tallone ed intorno alla gamba arrivando appena sotto il ginocchio con una tecnica a spirale. Una volta applicato, il bendaggio dovrebbe aderire perfettamente alla gamba. - Iniziando dalle teste metatarsali, il bendaggio dovrebbe avvolgere delicatamente il piede ed il tallone e dopo, mentre si avvolge la caviglia, applicare una piegatura nella parte anteriore della gamba.

Si dovrebbe ripetere risalendo la gamba fino ad arrivare appena sotto il ginocchio. Si puó procedere con un bendaggio compressivo. Caratteristiche: - semplice da applicare, - facile da rimuovere, - scarse reazioni di sensibilizzazione. Avvertenze: ipersensibilità a componenti della pasta. Le confezioni devono essere mantenute in luogo fresco. Cod. 4948