

## CELEVIS PLUS 30 ML

**Marchio:** NATHURA  
**Codice Min.:** 942873617  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**CELEVIS PLUS** Descrizione Dispositivo medico Classe IIB (Direttiva 93/42/CEE). Monouso. Utile per il trattamento di sintomi, quali bruciore, prurito e dolore durante l'evacuazione, associati a patologia emorroidaria, ragadi anali e stati irritativi della zona anale e perianale. Favorisce i processi riparativi e riepitelizzanti, idratando e proteggendo la cute e le mucose; lubrifica in caso di dolore da difficoltà di

evacuazione. Contribuisce a prevenire lesioni e irritazioni da sfregamento. Senza profumo. Senza parabeni. Nichel tested. Modalità d'uso Utilizzare dopo ogni evacuazione. Usare anche più volte al giorno secondo necessità o parere medico. In caso di dolore durante l'evacuazione, applicare a scopo lubrificante prima di ogni evacuazione. Svitare il tappo e rompere il sigillo di sicurezza con il retro-tappo.

- Uso esterno (perianale e/o anale): applicare il gel sulla zona interessata con un lieve massaggio.
- Uso interno (rettale): utilizzare l'apposita cannula annessa alla confezione e seguire le istruzioni che seguono.

- 1) Svitare il tappo e avvitare la cannula.
- 2) Lubrificare la parte esterna della cannula esercitando una lieve pressione sul tubo per permettere la fuoriuscita di una piccola quantità di gel.
- 3) Procedere delicatamente all'applicazione interna ed esercitare un' ulteriore pressione sul tubo.
- 4) Dopo l'uso rimuovere immediatamente la cannula, pulirla accuratamente con acqua e ricoprirla con l'apposito cappuccio.

Componenti Acido ialuronico sale sodico, miele di acacia, estratto secco Centella asiatica, estratto idroglicerico Hamamelis virginiana, acqua depurata, copolimero idrossietil acrilato/sodio acriloidimetil taurato, glicerina, esano-1,2-diolo, glicole caprilico, etilesil glicerina, polisorbato 60, sorbitano isostearato, disuccinato trisodico dell'etilenediammina, acido lattico.

**Avvertenze** Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. L'uso continuativo del dispositivo medico non deve superare i 30 giorni. Utilizzare la cannula annessa alla confezione esclusivamente con CELEVIS® Plus. L'uso della cannula è strettamente personale. Poiché non sono disponibili dati completi, si raccomanda di utilizzare il prodotto esclusivamente su indicazione e sotto controllo medico in caso di: gravidanza ed allattamento; associazione con altri prodotti ad uso topico nella stessa destinazione d'uso di Celevis Plus. In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico. Non utilizzare se la confezione originale risulta aperta, danneggiata o incompleta.

**Conservazione** Conservare in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Tubo da 30 ml con applicatore rettale. Cod. 73110230