

## COMPEED CEROTTI PER DURONI MEDIO 6 PEZZI

**Marchio:** COMPEED  
**Codice Min.:** 979605449  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**COMPEED CEROTTI PER DURONI MEDIO** Descrizione Sollievo immediato dal dolore. La tecnologia dell'Idrocolloide Compeed è costituita da microparticelle che migliorano l'idratazione ed ammorbidiscono il callo. Compeed agisce come una seconda pelle e aiuta a riequilibrare il naturale livello di umidità per proteggere contro lo sfregamento e la pressione, donare sollievo immediato dal dolore dei duroni e idratare ed ammorbidire il durone per favorirne la rimozione. Resta applicato per più di 24 ore. La durata può variare da soggetto a soggetto. Modalità d'uso Ammorbidire la pelle immergendo i piedi in acqua tiepida e rimuovere le callosità ammorbidite con un asciugamano. Pulire e asciugare la zona trattata. Rimuovere le due linguette di carta che proteggono Compeed, avendo cura di non toccare la parte adesiva. Applicare Compeed direttamente sul durone. Lasciare Compeed applicato fin quando non si stacca da solo

(potrebbe rimanere applicato per diversi giorni). Ripetere il trattamento fino a completa rimozione del durone. Avvertenze Per i diabetici consultare il proprio medico prima dell'utilizzo. Non applicare sulle ferite infette. Non riutilizzare perché può causare infezioni. Non tagliare mai il cerotto Compeed. Eventuali residui di adesivo su calze o scarpe possono essere rimossi con alcool, tenendo conto delle specifiche istruzioni del tessuto. Conservazione Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione da 6 cerotti. Cod. COCMZ300A