

## CONNETTIVINASILVER PLUS SPRAY 50 ML

**Marchio:** CONNETTIVINA  
**Codice Min.:** 975454986  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



CONNETTIVINASILVER Plus Spray Descrizione Trattamento delle lesioni cutanee non infette (per esempio, abrasioni, escoriazioni, fissurazioni, tagli, piccole ferite chirurgiche, scottature localizzate di primo e secondo grado), nel piede diabetico, nel piede d'atleta e nelle lesioni da decubito. CONNETTIVINASILVER PLUS SPRAY è una sospensione spray per uso topico contenente acido ialuronico (HA), argento metallico e vitamina E. L'acido ialuronico e l'argento sono uniti in una matrice (caolino e amido) con proprietà assorbenti. L'assorbimento degli essudati crea un ambiente che facilita il naturale processo di rigenerazione tissutale formando, insieme all'HA e argento, una barriera protettiva contro la penetrazione microbica. L'azione filmogena della vitamina E, coadiuvando il processo di riepitelizzazione, favorisce il ripristino delle condizioni ottimali di idratazione della cute.

Modalità d'uso Le lesioni devono essere pulite prima dell'applicazione. Agitare energicamente il contenitore prima dell'uso per qualche secondo. Tenendo il contenitore in posizione verticale, spruzzare ad una distanza di circa 15 cm una quantità di polvere sufficiente a coprire la superficie da trattare. Si suggerisce di coprire la parte medicata con una garza sterile. Applicare una o due volte al giorno, secondo l'evoluzione clinica. Può essere facilmente rimosso pulendo la lesione con soluzione fisiologica. Composizione Componente principale: acido ialuronico sale sodico 0,25%; altri componenti: argento metallico, caolino, amido di mais, vitamina E, olio di riso, terpinenolo, disiloxane, propellente. Avvertenze Uso esterno: non ingerire né inalare. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto lavare con acqua. Evitare di esporre alla luce solare le aree trattate. Evitare il diretto contatto dell'erogatore con la ferita. Sospendere l'uso e consultare il medico in caso di reazioni avverse. Per l'uso prolungato consultare il medico. Richiudere la confezione dopo l'uso. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o dopo la data di scadenza. Non fumare. Non vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Dopo l'uso, eliminare secondo le norme nazionali vigenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare a temperatura da +5° a +30°C. Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Termine ultimo di conservazione dalla data di produzione, in confezione integra: 36 mesi. Formato Bomboletta da 50 ml. Cod. 10000243