

DILATATORE ANALE DILATAN PLUS DIAMETRO 18/20 CRIOTERMICO 2 PEZZI

Marchio: -
Codice Min.: 904359940
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Dilatan Plus DILATATORE ANALE Indicazioni: contiene un gel termoaccumulatore in grado di apportare i benefici della termoterapia o della crioterapia in diverse condizioni patologiche anali: stenosi (restringimento) dell'orifizio di origine cicatriziale o idiopatica; ipertono o spasmo sfinterico sostenuto da emorroidi, proctalgia essenziale, ragade, con eventuale stipsi secondaria; prevenzione della stenosi postoperatoria dopo intervento per emorroisi e fistola. Modalità d'uso: nella crioterapia raffreddare in frigorifero il dilatatore ad utilizzare o immergerlo per 10/15 minuti in acqua e ghiaccio. Nella termoterapia riscaldare in acqua calda (non superiore a 50°) per circa 10/15 minuti il dilatatore da utilizzare.

Spalmare quindi il dilatatore con crema o unguenti lubrificanti. Inserire il

dilatatore nell'orifizio anale lentamente fino alla sua base stando seduti sul bidé o distesi su un fiaco, indifferentemente prima o dopo la defecazione. In caso di spasmo sfinteriale é consigliabile far precedere la dilatazione da un bidé tiepido-caldo che ha effetto rilassante sulla muscolatura degli sfinteri anali. Il dilatatore va tenuto in sede per circa uno-tre minuti e quindi estratto lentamente. Si consiglia di non alzarsi e di non camminare con il dilatatore inserito. Cod. A1001 / A1002 / A1030