

DISPOSITIVO MEDICO PER VERRUCHE IN FLACONE CON PENNELLINO 10ML + 9 CEROTTI COPRIVERRUCA

Marchio: UNGHIASIL
Codice Min.: 935308864
Link: [clicca qui per acquistare](#)



UNGHIASIL SOS VERRUCHE Descrizione Unghiasil SOS Verruche DM è un dispositivo medico indicato nel trattamento di verruche volgari, perungueali, plantari e a mosaico. Forma un film protettivo a livello della superficie della verruca, che garantisce un'azione localizzata e protratta nel tempo. È utile anche per il trattamento di calli e duroni. La confezione contiene anche alcuni cerotti che migliorano la permanenza del prodotto sulla zona da trattare. Proprietà Azione sinergica di due componenti principali: acido salicilico e acido lattico. Entrambi svolgono una funzione cheratolitica, capace cioè di rammollire e dissolvere lo strato corneo (indurito) dell'epidermide. Consente di ottenere buoni risultati anche per il trattamento di

ipercheratosi cutanee (tipiche di calli e duroni). I primi risultati si ottengono dopo un breve periodo di trattamento. Componenti Collodio, acido lattico, acido salicilico, alcol isopropilico, olio di ricino. Modalità d'uso Applicare direttamente con l'apposito applicatore sulla zona della cute interessata dalla verruca (o da calli e duroni), evitando il contatto con le aree cutanee circostanti. Dopo circa un minuto dall'applicazione, si formerà una pellicola bianca aderente alla superficie della verruca e già in questa fase Unghiasil SOS Verruche DM inizierà ad agire. Ripetere l'applicazione 2 volte al dì, mattina e sera. In caso di verruche profonde, dopo aver applicato Unghiasil SOS Verruche DM e lasciato asciugare, applicare il cerotto contenuto nella confezione direttamente sopra la verruca. Questo consentirà di ottenere un effetto maggiormente occlusivo che potenzierà l'efficacia del prodotto. Si consiglia di rinnovare l'applicazione del liquido e la copertura con il cerotto ogni uno/due giorni. Utilizzare con costanza fino al naturale distaccamento della verruca. Avvertenze Applicare solo sulla verruca. Evitare il contatto con la cute sana. Non applicare sul viso, nella zona ano-genitale e in generale sulle mucose. In caso di arrossamento e dolore sospendere l'applicazione. Non utilizzare in caso di diabete o problemi circolatori, salvo diversa prescrizione medica. Non utilizzare per prevenire le verruche. Evitare il contatto con occhi. In qualche raro caso l'utilizzo di Unghiasil SOS Verruche DM potrebbe causare fenomeni di sensibilizzazione. In tale caso si consiglia di sospendere il trattamento. Prodotto per solo uso esterno. Tenere fuori della portata dei bambini. Non applicare Unghiasil SOS Verruche DM su cute lesa, ferite aperte, zone arrossate e su aree di grandi dimensioni, nevi, verruche seborroiche, condilomi, verruche del viso, calli infetti. In gravidanza e allattamento: prima di applicare il prodotto chiedere consiglio al medico o al farmacista. Formato Flaconcino da 10 ml + 9 cerotti coprивerruca. Cod. VVUN052