

DROPYAL EVO GOCCE OCULARI STERILI 10 ML

Marchio: BRUSCHETTINI
Codice Min.: 943205359
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DROPYAL EVO gocce oculari sterili Descrizione Dispositivo medico. Idrogel acquoso sterile contenente sodio ialuronato, sorbitolo, glicerina e cianocobalamina da utilizzare per istillazioni sui tessuti oculari per la sua azione lubrificante, idratante, viscoelastica, mucoadesiva, protettiva, antiossidante, facilitante la riepitelizzazione delle mucose oculari. Le concentrazioni di tali sostanze sono state appositamente studiate al fine di garantire all'idrogel ottenuto caratteristiche simili a quelle del liquido lacrimale senza causare offuscamento visivo. Grazie alle proprietà dei suoi componenti il dispositivo protegge i tessuti oculari dalle conseguenze dello stress ossidativo dovuto a fattori ambientali sfavorevoli (intensa irradiazione solare o artificiale, radiazioni da videoterminali, fumo, aria condizionata, stress meccanico da lenti a contatto) e ne facilita il ripristino del naturale trofismo epiteliale. È perfettamente trasparente, di

colore rosa per la presenza della vitamina B12. Il colore rosa non viene assorbito dalle lenti a contatto. È miscibile con il liquido lacrimale in tutte le proporzioni. Ha valori di pH, viscosità, osmolarità perfettamente compatibili con i tessuti oculari e con il liquido lacrimale ed ha pertanto un elevato grado di tollerabilità. Senza conservanti. Modalità d'uso Istillare 1-2 gocce della soluzione del dispositivo nel sacco congiuntivale inferiore dell'occhio, esercitando una leggera pressione sul corpo del flaconcino. È consigliabile ripetere l'operazione 2-3 o più volte al giorno quando necessario, per non più di 30 giorni consecutivi. Componenti Sodio ialuronato 0,150%, cianocobalamina (vitamina B12) 0,010%, sorbitolo, glicerina, disodio edetato, acido borico, sodio tetraborato, sodio cloruro, acqua depurata. Avvertenze Tenere fuori dalla portata e della vista dei bambini. Data l'assenza di sali di ammonio quaternario, il dispositivo può essere utilizzato anche da portatori di lenti a contatto. Non toccare l'occhio con la punta del contagocce. Non usare in caso di infezioni agli occhi. Non usare contemporaneamente ad altri colliri. Non usare in caso di incompatibilità nota verso qualsiasi componente della preparazione. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non usare il prodotto nel caso in cui il contenitore primario fosse danneggiato. Conservazione Conservare il flacone al di sotto di 25 °C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità post-apertura: 56 giorni. Formato Flacone contagocce da 10 ml