

EFFERDENT 90 COMPRESSE EFFERVESCENTI

Marchio: EFFERALGAN
Codice Min.: 983038783
Link: [clicca qui per acquistare](#)



efferdent Descrizione Compresse effervescenti per la pulizia profonda e l'igiene della dentiera. Rimuove i residui alimentari e aiuta a prevenire la formazione della placca batterica, responsabile di gengitivi, irritazioni, alito pesante. Contro le macchie più tenaci per proteggere la qualità della protesi. Esercita un'azione pulente e igienizzante che aiuta ad eliminare i batteri responsabili del cattivo odore. Modalità d'uso Mettere una compressa in un bicchiere d'acqua tiepida o leggermente calda. Immergere completamente la protesi. I 5 componenti cominciano subito ad agire e l'acqua si colora di blu. Dopo pochi minuti l'acqua torna al suo colore naturale. Efferdent avrà completato la sua azione pulente. La protesi può essere lasciata nella soluzione. Rimuovere la protesi dal bicchiere e sciacquare con cura. La protesi ora è pronta all'uso. Gettare la soluzione dopo il

suo utilizzo. Componenti Sodio Bicarbonato, Acido Citrico, Latosio, Potassium Monopersulfate, Sodio Carbonato, PVP/VC Copolymer, Sodium Lauryl, Peppermint Flavour, CI 73015. Contiene: Pentapotassium bis (peroxymonosulphate) bis (sulphate), Idrogenosolfato di potassio, Perossidisolato di potassio, Sodio lauril solfato, 1,8-Cineolo, Limonene, Pin-2(3)-ene. 30% sbiancanti a base di ossigeno, Avvertenze Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene Perossidisolato di potassio. Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. In caso di ingestione: sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un Centro Antiveleni/un medico. Solo per uso esterno. Gettare la soluzione dopo l'uso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non usare se allergici a degli ingredienti o ai persolfati. Non mettere la compressa in bocca. La polvere della compressa può causare danni agli occhi. Non bere la soluzione, non fare gargarismi. Sciacquare bene la dentiera prima di rimetterla in bocca. In caso di irritazione, gonfiore o dolore, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi al medico di fiducia. Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità individuale verso qualche componente. Conservazione Conservare in luogo secco e asciutto. Formato 90 compresse effervescenti. Cod. 16319