

## ESI NODOL THERMO CEROTTI 3 PEZZI

**Marchio:** NO DOL  
**Codice Min.:** 8008843011278  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



NO - DOL THERMO CEROTTI Dispositivo Medico CE, classe IIa. I cerotti sfruttando il concetto del calore terapeutico, per alleviare i dolori articolari e le mialgie e ripristinare lo stato normale di benessere dei muscoli. L'innovativa tecnologia consente l'applicazione di calore terapeutico (40°C) costante e controllato, permettendo ai cerotti di mantenere la temperatura corretta per 8 ore. Il dispositivo fornisce calore che entra in profondità nei tessuti muscolari a 2 cm e donano sollievo dal dolore fino a 16 ore. Il calore prolungato, a temperatura costante, aumenta la circolazione del sangue nei tessuti, producendo effetti antidolorifici e rilassando la muscolatura, infatti: aumenta l'apporto di ossigeno ai tessuti danneggiati, aiutando il muscolo a ritornare allo stato di benessere;

stimola le terminazioni nervose, sensibili alla temperatura, interrompendo la trasmissione del dolore, favorendo così il rilassamento muscolare e riducendo la rigidità delle articolazioni. Modalità d'utilizzo Aprire la busta (solo al momento dell'uso) ed estrarre il cerotto. Rimuovere la pellicola trasparente. Applicare il cerotto sulla parte interessata (su pelle pulita ed asciutta) facendo aderire bene lungo i bordi. Rimuovere dopo circa 8 ore, non riutilizzarlo nell'arco delle 24 ore. Componenti Ferro; sodio poliacrilato; carbone attivo; sodio cloruro; sodio tripolifosfato; acqua. Formato Astuccio da 3 cerotti in buste singole. Cerotti 13 x 9,5 cm. Cod. 0665