

## FASCIA THERMACARE DOLORI MESTRUALI 3 PEZZI

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 981076134  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**ThermaCare FASCE AUTORISCALDANTI PER I DOLORI MESTRUALI** Descrizione Le contrazioni muscolari dell'utero sono la causa dei dolori mestruali che interessano la zona del basso ventre e la schiena. ThermaCare Per I Dolori Mestruali fornisce calore terapeutico che rilassa i muscoli addominali per dare sollievo dai crampi mestruali e dal mal di schiena associato. Efficace contro il dolore. Confortevole da indossare, sottile e discreto. Monouso. Non contiene farmaci. Modalità d'uso Aprire l'involucro quando si è pronti per l'uso. ThermaCare può impiegare no a 30 minuti per raggiungere la sua temperatura terapeutica Rimuovere la carta protettiva per scoprire la parte adesiva. Posizionare sull'area dolente applicando il

lato adesivo sulla biancheria intima e non a contatto con la pelle (parte del cerotto potrebbe fuoriuscire dallo slip). Per una massima efficacia, vi raccomandiamo di indossare ThermaCare per 8 ore. Il prodotto può essere gettato caldo o freddo tra i normali rifiuti domestici. Avvertenze Non utilizzare: - se il contenuto delle celle fuoriesce e/o la fascia è danneggiata; - con creme o unguenti medicati, cerotti o altre fonti di calore; - sulla pelle graffiata o escoriata; - su lividi e gonori comparsi nelle ultime 48 ore; - sulle zone corporee insensibili al calore; - da persone che non siano in grado di seguire tutte le istruzioni d'uso o che non siano in grado di rimuovere il prodotto da sole, inclusi bambini e anziani non autosufficienti. Chiedere il parere del medico prima dell'uso nei casi di diabete, problemi di circolazione, malattie cardiache, artrite reumatoide e gravidanza. Questo prodotto può causare scottature, per ridurre il rischio: - Controllare periodicamente la pelle per verificare la presenza di eventuali segni di irritazione o scottature e, nel caso si riscontrassero, sospendere subito l'uso. - Qualora si avvertisse una sensazione di calore eccessiva, interrompere l'uso o indossare ThermaCare sopra un capo di vestiario, non a contatto diretto con la pelle. - Al di sopra dei 55 anni d'età, il rischio di scottature aumenta con il passare degli anni, non indossare ThermaCare mentre si dorme. - Per evitare un aumentato rischio di ustioni, rimuovere il prodotto prima di sottoporsi a esami RM (Risonanza Magnetica). - Non usare per più di 8 ore nell'arco delle 24 ore. - Non esercitare una pressione eccessiva sul prodotto, né indossarlo sotto vestiti stretti o cinture. Interrompere l'uso e consultare un medico qualora il dolore aumentasse o rimanesse invariato dopo 4 giorni e in caso si notasse fastidio, irritazione, bruciore, gonore, arrossamento o qualsiasi altro cambiamento persistente a livello della pelle nella zona dove si è indossato il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Le celle che generano calore contengono ferro (&#8764;2 g). Se il ferro entra in contatto diretto con la pelle o gli occhi, rimuovere la fascia, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico immediatamente. Anche in caso di ingestione accidentale consultare il medico. Evitare di scaldare il

prodotto in alcun modo (es: forno a microonde) o cercare di riscaldarlo, poichè la fascia potrebbe prendere fuoco. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione e sull'etichetta. Formato Confezione da 3 pezzi. Cod. F00573302033W