

## **GARZA MEDICATA BACTIGRAS CON CLOREXIDINA ACETATO 0,5% 10X10CM 10 PEZZI**

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 900106776  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Garza Bactigras Dispositivo medico CE. Garza imbevuta di Paraffina con Acetato di Clorexidina; sterile (sterilizzato a raggi gamma), monouso. Confezionata in busta singola peel-open. Bactigras va utilizzato solo per uso topico. E' indicato per un'ampia gamma di ferite dove c'è un rischio di infezione, o su ferite già infette, in combinazione con un antibiotico sistemico. La gamma di ferite sulle quali Bactigras può essere utilizzato include: - ustioni e scottature minori, - lacerazioni, abrasioni e ferite con perdita di sostanza, - aree di prelievo e innesto cutaneo, - ulcere dell'arto inferiore. Bactigras agisce come una barriera tra la ferita e la medicazione secondaria, permettendo all'essudato di passare nella medicazione secondaria assorbente. L'antisettico acetato di Clorexidina viene rilasciato

lentamente dalla medicazione, fornendo un'azione durevole contro i batteri Gram-negativi e Gram-positivi. Modalità d'uso 1) Pulire la ferita con la tecnica standard. 2) Selezionare la corretta dimensione della medicazione ed aprire la busta. 3) Usando guanti e pinze, rimuovere la carta protettiva. 4) Posizionare la medicazione sulla ferita in un unico strato, a diretto contatto con la superficie della lesione. 5) Applicare una medicazione secondaria assorbente, se necessario, e fissare con una benda autoaderente (es. Easifix) o con del cerotto (es. Hypafix). 6) Rimozione. Bactigras può essere lasciato in situ (nella sede che gli compete) quando la medicazione secondaria viene cambiata. La frequenza del cambio della medicazione dipende dalle condizioni cliniche della ferita e varia da una volta al giorno a due volte la settimana. 7) Se la medicazione aderisce alla ferita, impregnarla leggermente con soluzione sterile. Componenti Garza di cotone impregnata di paraffina bianca contenente clorexidina acetato allo 0,5%. Precauzioni d'uso Bactigras non dovrebbe essere usato su una superficie superiore al 10% dell'area corporea totale. Non dovrebbe inoltre essere usato in casi di sensibilità o allergia alla clorexidina. Evitare il contatto con gli occhi, l'orecchio medio, le meningi e l'encefalo. Bactigras non è compatibile con i saponi o altre sostanze anioniche (es. alcuni detergenti cutanei) come pure allo ioduro di potassio. Evitare l'uso di Bactigras con sostanze ossidanti (es. Eusol, Acqua ossigenata e soluzione iodate). Non usare il contenuto se la confezione è aperta o danneggiata. Conservazione Conservare in orizzontale in luogo asciutto ( Formato Confezioni: Garza 10x10 cm da 10 pezzi. Garza 15x20 cm da 10 pezzi. Garza 10x10 cm da 1 pezzo. Cod. 7457/ 7461