

## GEL NASALE RINOREX 20 ML

**Marchio:** RINOREX  
**Codice Min.:** 922887207  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Rinorex<sup>®</sup> gel Gel a base di acido ialuronico in soluzione ipertonica di NaCl con erogatore spray. È utile in caso di secchezza delle mucose nasali e dove è necessaria un'azione fortemente idratante, riepitelizzante e decongestionante. Modalità d'utilizzo 1-2 spruzzi per narice, 3-4 volte al giorno o più spesso al bisogno. Togliere il cappuccio di protezione dell'erogatore. Tenere il capo in senso verticale, posizionare delicatamente il beccuccio erogatore all'imbocco della narice in senso obliquo. Premere con due dita sulla base dell'erogatore. Irrorare ed inspirare contemporaneamente. Aspettare qualche secondo per il ripristino della pompa. Ripetere l'operazione con l'altra narice. Pulire l'erogatore. Rimettere il cappuccio di protezione dell'erogatore.

**Componenti** Acqua; sodio ialuronato; cloruro di sodio; glicerolo vegetale; sodio deidroacetato.  
**Avvertenze** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale. Evitare di spruzzare negli occhi. L'uso dello stesso flacone da parte di più soggetti può facilitare la trasmissione di infezioni. Utilizzare solo su mucosa integra. **Conservazione** Conservare a temperatura ambiente, al riparo da luce e fonti di calore. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.  
**Formato** Gel in flacone di vetro da 20 ml, con erogatore spray verticale.