

GIBAUD ORTHO ARTIGIB 3D GINOCCHIERA LEGAMENTI TAGLIA 04

Marchio: GIBAUD
Codice Min.: 981979139
Link: [clicca qui per acquistare](#)

Dr. GIBAUD ORTHO ARTIGIB 3D GINOCCHIERA LEGAMENTI Descrizione Dispositivo medico di classe I. Il dispositivo medico fornisce una compressione di Classe 3 (Francese), un effetto propriocettivo e un riallineamento della rotula. Steccaggio laterale a spirale per la stabilizzazione dell'articolazione. Anello in silicone di stabilizzazione e centraggio della rotula. Rivestimento del centraggio rotuleo in silicone termosaldato. Zona di decompressione a livello rotuleo. Zona di decompressione traspirante a livello del cavo popliteo (parte posteriore del ginocchio). Orlo superiore in Silicotex® con effetto antiscivolo. Tessuto compressivo realizzato con 3D Motion Technology. Modalità d'uso Indossare la ginocchiera posizionando il centraggio rotuleo in corrispondenza della rotula. Si consiglia di infilare la ginocchiera mantenendo rivoltato l'orlo siliconato all'altezza della linea blu di riferimento. Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco. Componenti Poliammide, poliestere, elastan, poliuretano, TPE-S-silicone; stecche: 100% acciaio. Avvertenze Non utilizzare nei casi in cui la compressione è controindicata. Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico. Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone. Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa. Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto. Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario. In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale. Il tutore non deve essere utilizzato nel caso in cui sia necessaria una immobilizzazione relativa, assoluta o l'operazione chirurgica. In caso di problemi circolatori agli arti inferiori (es diabete o insufficienza vascolare periferica), si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo medico. E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità. Conservazione Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce. Formato Taglia 4 (circonferenza ginocchio in cm: da 43 a 48) (circonferenza coscia misurata 15 cm sopra il ginocchio in cm: 51-56). Cod. 5G0519X11NB04