

## GIBAUD ORTHO LIGAGIB OPEN GINOCCHIERA ARTICOLATA 03

**Marchio:** GIBAUD  
**Codice Min.:** 935773806  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Ginocchiera Ligagib Open Dispositivo medico indicato per distorsioni di media gravità, traumi gravi in fase di rieducazione e riabilitazione, dopo intervento chirurgico, postumi di traumi, instabilità e lassità cronica. Caratteristiche: - Apertura anteriore per facilitare l'applicazione e l'adattamento. - Tessuto tridimensionale aerato, leggero, traspirante e confortevole. - Articolazioni policentriche per limitare la traslazione antero-posteriore del ginocchio. - Steccaggio laterale rigido per garantire la stabilità laterale. - Ampia adattabilità grazie alle chiusure a strappo. - Cinghie regolabili a chiusura contrapposta (due anteriori e due posteriori). - Finestra rotulea con due cuscinetti di centraggio a forma di C. - Apertura in corrispondenza del cavo popliteo per facilitare la flessione. Modalità

d'utilizzo Il primo posizionamento dovrà essere effettuato da uno specialista qualificato. Oltre alla misurazione è necessaria una prova per un corretto adattamento ed una buona comprensione del posizionamento dell'ortesi. L'etichetta interna deve risultare nella parte alta della gamba. Consigliamo la seguente procedura per indossare l'ortesi: - Aprire completamente la ginocchiera e posizionare la finestra posteriore a livello del cavo popliteo. - Chiudere le estremità superiore e inferiore centrando i cuscinetti rotulei a forma di C attorno alla rotula. - Fissare le cinghie anteriori per ottenere un posizionamento stabile ma confortevole. - Terminare l'applicazione regolando la chiusura delle cinghie posteriori; le stecche devono essere parallele e centrate sull'asse del ginocchio. Componenti Poliammide 81%, elastan 19%. Avvertenze Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio: - Togliere le articolazioni e lavare a mano in acqua a 30 °C con sapone o detersivo neutri. - Sciacquare accuratamente. - Non strizzare. - Lasciare asciugare orizzontalmente. - Non stirare. Formato Taglie disponibili: 1 (da 31 a 34 cm di circonferenza del ginocchio). 2 (da 34 a 37 cm di circonferenza del ginocchio). 3 (da 37 a 40 cm di circonferenza del ginocchio). 4 (da 40 a 43 cm di circonferenza del ginocchio). 5 (da 43 a 46 cm di circonferenza del ginocchio). 6 (da 46 a 50 cm di circonferenza del ginocchio). Cod.5G0524X00BA01/5G0524X00BA02/5G0524X00BA03/5G0524X00BA04/5G0524X00BA05/5G0524X00BA06