

GIBAUD ORTHO ROTULGIB 3D GINOCCHIERA ROTULEA TAGLIA 02

Marchio: GIBAUD
Codice Min.: 981979267
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Dr. GIBAUD ORTHO ROTULGIB 3D Descrizione Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i. Ginocchiera rotulea. Il dispositivo medico fornisce una compressione di Classe 3 (francese), un effetto propriocettivo e un riallineamento della rotula. Centraggio e stabilizzazione rotulea con pressore tendineo garantiti da un anello viscoelastico adattabile alla forma del ginocchio. Rivestimento del centraggio rotuleo in silicone termosaldato. Zona di decompressione traspirante a livello del cavo popliteo (parte posteriore del ginocchio). Orlo superiore in Silicotex con effetto antiscivolo. Tessuto compressivo realizzato con 3D Motion Technology. Tabella taglie Circonferenza ginocchio Circonferenza coscia misurata 15 cm sopra il ginocchio Taglia Da 28 a 33 cm 36-41 cm 1 Da 33 a

38 cm 41-46 cm 2 Da 38 a 43 cm 46-51 cm 3 Da 43 a 48 cm 51-56 cm 4 Da 43 a 48 cm 56-61 cm 4+ Da 48 a 53 cm 56-61 cm 5 Da 48 a 53 cm 61-66 cm 5+ Modalità d'uso Indossare la ginocchiera posizionando il centraggio rotuleo in corrispondenza della rotula. Si consiglia di infilare la ginocchiera mantenendo rivoltato l'orlo siliconato all'altezza della linea blu di riferimento. Lavaggio Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco. Componenti Poliammide, elastan, poliestere, silicone, poliuretano, SEBS. Avvertenze È consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità. Non utilizzare nei casi in cui la compressione è controindicata. Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico. Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone. Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa. Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario. In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale. Quando si regolano le cinghie, tenderle in modo che siano stabili ma confortevoli. Il tutore non deve essere utilizzato nel caso in cui sia necessaria una immobilizzazione relativa, assoluta o l'operazione chirurgica. In caso di problemi circolatori agli arti inferiori (es diabete o insufficienza vascolare periferica), si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo medico. Conservazione Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce. Formato Taglia 2 Cod. 5G0518X11NB02