

GLICEROLAX ADULTI MICROCLISMI EVACUANTI 6 PEZZI X 9 G CONTIENE AMIDO DI RISO

Marchio: -
Codice Min.: 939641686
Link: [clicca qui per acquistare](#)



GLICEROLAX DM Dispositivo medico monouso CE. Il dispositivo medico Glicerolax dm è un microclisma monouso, ad azione e durata temporanea, indicato per facilitare l'evacuazione delle feci e può essere usato ogni volta che sia necessario alleviare la costipazione intestinale o in preparazione di esami del retto. Le preparazioni per uso rettale a base di glicerolo presentano una immediata azione evacuante agendo sulla parte terminale del retto senza essere assorbite dalla mucosa intestinale. Il glicerolo, infatti, ammorbidisce, lubrifica e movimentata la massa fecale facilitandone l'espulsione. La presenza dell'amido di riso e dell'estratto naturale di Malva, conferisce al prodotto un effetto emolliente e protettivo della mucosa rettale e contribuisce a migliorarne la tolleranza locale. Il

prodotto contiene amido di riso, completamente privo di glutine. Il prodotto è senza glutine. Modalità d'uso Adulti e adolescenti: 1 - 2 microclismi da 9 g nelle 24 ore al bisogno. Istruzioni d'uso: 1) togliere il cappuccio dalla cannula; 2) lubrificare la cannula con qualche goccia della soluzione stessa; 3) introdurre la cannula nell'orifizio anale senza schiacciare il soffiETTO; 4) comprimere il soffiETTO per immettere il liquido nel retto; 5) estrarre la cannula senza cessare la compressione del soffiETTO per evitare di riassorbire il liquido. Il microclisma è monouso, pertanto non deve essere riutilizzato. Eventuale prodotto residuo deve essere eliminato. Componenti Glicerolo vegetale 76,7% (pari a g 6,9 per microclisma da 9 g), amido di riso, Malva estratto fluido, acqua depurata q.b. Il prodotto contiene amido di riso, completamente privo di glutine. Avvertenze Non usare in caso di ipersensibilità ad uno o più componenti, dolore addominale acuto o di origine sconosciuta, nausea o vomito, ostruzione o stenosi intestinale, sanguinamento rettale di origine sconosciuta, crisi emorroidale acuta, grave stato di disidratazione. In caso di stipsi persistente consultare il medico. Gravidanza e allattamento: anche se non ci sono evidenti controindicazioni all'uso del dispositivo in gravidanza, se ne raccomanda l'utilizzo solo in caso di necessità e dopo aver consultato il medico o il farmacista. Conservazione Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla scatola o se la confezione non appare integra. Conservare nella confezione originale lontano dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Formato 6 microclismi evacuanti per adulti da 9 g. Cod. 1.35.10.0165