

GOCCE OCULARI IRILENS FLACONE 10 ML

Marchio: IRIDINA
Codice Min.: 930252782
Link: [clicca qui per acquistare](#)



irilens GOCCE OCULARI Soluzione oftalmica sterile ad effetto idratante e lubrificante, contenente acido ialuronico sale sodico allo 0,4% di di origine biotecnologica ad alto peso molecolare. L'acido ialuronico sale sodico è un mucopolisaccaride che, in caso di alterazioni del film lacrimato, ne ristabilisce l'equilibrio. La sua concentrazione allo 0,4% consente una maggiore idratazione con un'azione prolungata nel tempo. È quindi indicato in tutti i casi in cui si presentino disturbi causati da secchezza oculare. La soluzione contiene, inoltre, sodio idrossimetilglicinato (NIG) come sistema conservante. Non contiene benzalconio cloruro. Può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto. Modalità d'utilizzo o Aprire il flacone. o Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio premendo

leggermente il flacone. o Dopo l'uso, richiudere immediatamente il contenitore: il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 28 giorni dopo la prima apertura. o Il prodotto in flacone è monopaziente. o Ripetere, se necessario, l'operazione 2-4 volte al giorno. o I portatori di lenti a contatto possono applicare 1-2 gocce di soluzione su ogni lente prima dell'inserimento, per mantenere l'occhio umido e lubrificato. Componenti Acido ialuronico sale sodico 0,4%, sodio idrossimetilglicinato, sodio fosfato monobasico monoidratato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, EDTA, acqua per preparazioni iniettabili. Avvertenze Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. Lasciar trascorrere almeno 15 minuti dopo l'uso prima di instillare farmaci per uso oftalmico esterno. Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore. Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione. Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini. In caso di disturbi durante l'uso sospendere, il trattamento e consultare un medico. In alcuni casi, dopo la somministrazione, si è osservato un breve offuscamento della vista dovuto alla densità della soluzione, che comunque scompare molto rapidamente. Conservazione Conservare a temperatura non superiore a 30 °C. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. A confezionamento integro non superare la data di scadenza indicata sull'astuccio e sul flacone. Formato Flacone polidose contenente 10 ml di soluzione sterile.