

GOCCE OCULARI VISIODORON MALVA 20 MONODOSE DA 0,4 ML

Marchio: VISIODORON
Codice Min.: 925831962
Link: [clicca qui per acquistare](#)



WELEDA Visiodoron Malva Dispositivo medico CE 0483, classe IIb. Collirio con ialuronato di sodio e estratto di malva. Contiene acido ialuronico non geneticamente modificato e un estratto di fiori di Malva da coltivazione biologica controllata. Visiodoron Malva collirio non contiene conservanti, ciò lo rende particolarmente ben tollerato, può essere utilizzato per lunghi periodi ed è anche adatto per l'uso di lenti a contatto. Lo ialuronato di sodio stabilizza il film lacrimale e l'estratto di malva lenisce e idrata. Questa specifica formulazione idrata e lenisce occhi secchi ed irritati. Occhi secchi ed irritati sono sovente provocati da: - condizioni climatiche sfavorevoli, come per esempio ambienti climatizzati, vento, freddo, inquinamento dell'aria, polline; - iperaffaticamento degli occhi, per

es. intenso lavoro al computer, lunghi viaggi in auto; - sollecitazione meccanica, per es. uso di lenti a contatto, interventi diagnostici agli occhi; - assunzione regolare di determinati medicinali; - ridotta produzione di liquido lacrimale in età avanzata. Modalità d'utilizzo Al bisogno, instillare 1-2 gocce in ciascun occhio. Staccare un contenitore monodose ed assicurarsi che non sia danneggiato, altrimenti non è più possibile garantire la sterilità del contenuto. Per aprire, ruotare (non tirare) la linguetta piatta. Limitazioni d'uso Le persone che sono allergiche ad uno dei componenti di Visiodoron Malva collirio dovrebbero evitarne l'impiego. Precauzioni ed avvertenze Ogni contenitore monodose è destinato ad una sola somministrazione. Non utilizzare in seguito il liquido avanzato, poiché il collirio è senza conservanti. Evitare il contatto del contenitore con gli occhi. Dopo l'impiego può manifestarsi un passeggero calo dell'acutezza visiva, in questo caso non mettersi alla guida e non manovrare macchinari finché non siano nuovamente recuperate le normali facoltà visive. In caso di utilizzo di lenti a contatto idrogel si prega di rimuovere le lenti prima dell'applicazione di Visiodoron Malva e di inserirle nuovamente dopo circa 10 minuti. Visiodoron Malva collirio deve essere tenuto fuori della portata e della vista dei bambini. Il collirio può essere utilizzato solo entro la data stampigliata sul contenitore monodose e sulla scatola. Conservazione Conservare a temperatura compresa tra 2°C e 25°C. Tenere al riparo dal gelo. Componenti Ialuronato di sodio 0,15%; estratto di fiori di malva (Malva sylvestris L.) 0,5%; tampone citrato; sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili. Formato 20 contenitori monodose, ciascuno da 0,4 ml di soluzione. Cod. VIC