

HYALOSILVER PLUS SPRAY 125 ML

Marchio: HYALOSILVER
Codice Min.: 975454998
Link: [clicca qui per acquistare](#)



HYALOSilver Plus spray Descrizione Trattamento delle lesioni cutanee non infette (es. abrasioni, escoriazioni, fissurazioni, tagli, piccole ferite chirurgiche, scottature localizzate di primo e secondo grado), nel piede diabetico, nel piede d'atleta e nelle lesioni da decubito. Hyalosilver Plus Spray è una sospensione spray per uso topico contenente acido ialuronico (HA), argento metallico e vitamina E. L'acido ialuronico e l'argento sono uniti in una matrice (caolino e amido) con proprietà assorbenti. L'assorbimento degli essudati crea un ambiente che facilita il naturale processo di rigenerazione tissutale formando, insieme all'HA e argento, una barriera protettiva contro la penetrazione microbica. L'azione filmogena della vitamina E, coadiuvando il processo di riepitelizzazione, favorisce il ripristino delle condizioni ottimali di idratazione della cute. Composizione Acido ialuronico sale

sodico 0,25%, argento metallico, caolino, amido di mais, vitamina E, olio di riso, terpinenolo, disiloxane, propellente. Modalità d'uso 1) Le lesioni devono essere pulite prima dell'applicazione. 2) Agitare energicamente il contenitore prima dell'uso per qualche secondo. 3) Tenendo il contenitore in posizione verticale, spruzzare ad una distanza di circa 15 cm una quantità di polvere sufficiente a coprire la superficie da trattare. 4) Si suggerisce di coprire la parte medicata con una garza sterile. 5) Applicare una o due volte al giorno, secondo l'evoluzione clinica. 6) Può essere facilmente rimosso pulendo la lesione con soluzione fisiologica. Avvertenze Uso esterno: non ingerire né inalare. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto lavare con acqua. Evitare di esporre alla luce solare le aree trattate. Evitare il diretto contatto dell'erogatore con la ferita. Sospendere l'uso e consultare il medico in caso di reazioni avverse. Per l'uso prolungato consultare il medico. Richiudere la confezione dopo l'uso. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o dopo la data di scadenza. Nelle donne in stato di gravidanza usare il prodotto previo consiglio del medico. Controindicato in caso di ipersensibilità accertata verso i componenti. Pericolo: aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non contiene gas propellenti dannosi per l'ozono. Conservazione Conservare ad una temperatura da +5°C a +30°C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Bomboletta da 125 ml. Cod. 10000242