

## HYLOVISION HD PLUS COLLIRIO UMETTANTE E PROTETTIVO 15 ML

**Marchio:** HYLOVISION  
**Codice Min.:** 980292256  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**HYLO VISION HD PLUS** Descrizione Collirio umettante per idratare e proteggere la superficie dell'occhio, con acido ialuronico e allantoina. Per alleviare secchezza, infiammazione e lievi irritazioni. Grazie alla sua composizione, favorisce la rigenerazione cellulare. Soluzione sterile. Benefico ben tollerato e duraturo. Adatto per lenti a contatto rigide e morbide. Modalità d'uso 1. Lavare e asciugare le mani con cura. Per aprire, ruotare il tappo a vite in senso antiorario fino a rompere il sigillo di sicurezza. Dopo aver aperto il flaconcino per la prima volta, rimuovere l'anello di sicurezza. 2. Tenere il flaconcino con l'apertura rivolta verso il basso e applicare una o due gocce per occhio nel sacco congiuntivale. La soluzione viene distribuita con la chiusura delle palpebre, formando e forma uno strato liquido trasparente sulla superficie oculare. 3. Dopo l'uso, chiudere il flaconcino con il tappo. In alternativa, se si usa il collirio insieme alle lenti a contatto, applicare una o due gocce su ciascuna di esse prima di inserirle sugli occhi, invece di mettere il collirio direttamente negli occhi. Hylo-Vision HD Plus può anche essere applicato mentre si indossano le lenti a contatto. Componenti Ialuronato di sodio (0,20%), allantoina, poliesanide (PHMB 0,00015%), edetato di sodio (EDTA), cloruro di sodio, tampone fosfato isotonic, acqua purificata. Avvertenze - Controllare l'integrità del flaconcino per accertarsi che il contenuto sia sterile. - Non utilizzare se il flaconcino è danneggiato. - Non utilizzare se il liquido è torbido o presenta una colorazione. - Accertarsi che l'occhio non venga a contatto con il flaconcino, per evitare lesioni o infezioni. - Non toccare l'imboccatura del contenitore multidose con altri oggetti o parti del corpo. - In caso di effetti collaterali di qualsiasi tipo, rivolgersi a un medico specialista. - Non usare come unico trattamento di un'infezione oculare. - Non utilizzare contemporaneamente a farmaci o altri prodotti applicati sull'occhio, poiché Hylo-Visio HD Plus può alterarne l'effetto. - Lo stesso contenitore multidose non deve essere utilizzato da più pazienti. - Hylo-Vision HD Plus non è adatto come liquido di conservazione per lenti a contatto. - Hylo-Vision HD Plus deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. - Il preparato non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta e sulla scatola pieghevole. - Solo per uso esterno. Conservazione Conservare a temperature comprese fra 5 °C e 25 °C. Proteggere dal gelo e dalla luce solare diretta. Validità post-apertura: 90 giorni. Formato Contenitori multidose da 15 ml. Cod. MD2