

IRIPLUS EASYDROP 0,4% COLLIRIO 15 FLACONCINI MONODOSE DA 0,33 ML

Marchio: IRIPLUS
Codice Min.: 926022676
Link: [clicca qui per acquistare](#)



IRIPLUS GOCCE OCULARI STERILI EASYDROP Utilizzabile con lenti indossate Dispositivo medico CE, classe IIa. Gocce oculari sterili prive di conservanti, lenitive, protettive, rinfrescanti, antiarrossamento, utili in caso di arrossamento, bruciore, secchezza e affaticamento oculare. Combina elementi naturali quali: acqua distillata di Camomilla, Hamamelis e Malva, note per le loro proprietà rinfrescanti e lenitive; estratto di Mirtillo, utile per la protezione della superficie oculare; sodio ialuronato ad alta concentrazione (0,4%) che protegge, umidifica e lubrifica la superficie oculare, assicura sollievo immediato e prolungato in caso di tali disturbi. Indicato per proteggere, umidificare e lubrificare la superficie oculare, assicurando sollievo immediato e prolungato. Modalità di utilizzo Dopo

aver lavato bene le mani col sapone staccare il monodose dallo strip. Aprire il monodose ruotando e poi sollevando il tappo di chiusura. Dopo l'uso, gettare il flaconcino anche se residua del prodotto. Il prodotto è in monodose ed è monopaziente. Per i portatori di lenti a contatto: è possibile instillare il prodotto anche durante l'uso delle lenti a contatto. Instillare 1 o 2 gocce per occhio premendo leggermente il flaconcino. Si può usare 2 o 3 volte al giorno oppure secondo prescrizione medica. Composizione Acido ialuronico sale sodico 0,4 g; acqua distillata di camomilla; acqua distillata di hamamelis; acqua distillata di malva; acqua distillata di mirtillo; acido borico; sodio borato; sodio cloruro; potassio cloruro; acqua depurata. Avvertenze Il prodotto è solo per uso oftalmico. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso. Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore. Lasciar trascorrere 10-15 minuti tra l'instillazione del prodotto e l'eventuale instillazione di farmaci per uso oftalmico esterno. Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. In rari casi si è osservato un fugace offuscamento della vista all'instillazione dovuto all'alto contenuto di sodio ialuronato, esso tuttavia scompare molto rapidamente. In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico. Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini. Effetti collaterali Non sono noti né previsti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto. Le prove eseguite sul prodotto ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali. Conservazione Conservare nella confezione originale in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Formato Confezione da 3 strip con 5 contenitori da 0,33 ml.