

## KADERMIN POLVERE SPRAY SCX TECHNOLOGY 125 ML

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 925518072  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**KAdermin polvere spray** Descrizione Dispositivo medico in polvere spray che crea una barriera protettiva, coadiuvante per il trattamento di ferite, ulcere, abrasioni, ustioni minori, lesioni cutanee con essudato, eritemi da pannolino, macerazioni da sudore e lesioni traumatiche superficiali. Indicato anche nella medicazione delle ferite post-chirurgiche e del moncone del cordone ombelicale. Il dispositivo forma una barriera filmogena protettiva contro le aggressioni microbiche, favorendo il ripristino delle normali condizioni fisiologiche per una rapida cicatrizzazione. La funzione barriera è data dall'associazione del caolino con l'acido ialuronico. Il caolino assorbe l'essudato in eccesso della ferita, mentre l'acido ialuronico favorisce l'idratazione dei tessuti. L'applicazione non necessita di personale medico. Modalità d'uso Prima dell'utilizzo pulire la cute con soluzione fisiologica ed asciugare accuratamente. Agitare bene il flacone prima dell'erogazione. Applicare un sottile strato di

polvere solo nella zona interessata, erogare da una distanza di circa 10 cm. Non massaggiare, la polvere deve formare uno strato continuo protettivo. Rinnovare la medicazione 1 o più volte al giorno nel trattamento di eritemi da pannolone o sottomammari, ustioni e ferite traumatiche superficiali. Rinnovare la medicazione ogni 48 ore in caso di lesione per le quali la medicazione richiede l'intervento di personale medico. In caso di lesioni aperte, utilizzare una garza grassa come medicazione secondaria e garze sterili a copertura. Componenti SCX-powder (silicon dioxide functionalized with silver ions and chlorhexidine), kaolin, silica, sodium hyaluronate; propellente: miscela butano-propano. Avvertenze Per uso esterno, non ingerire. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata. Non sterilizzare. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Sospendere il trattamento in presenza di anomale reazioni cutanee ed informare il proprio medico ed il fabbricante. Recipiente sotto pressione, può scoppiare se riscaldato. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare solo per gli scopi indicati. Non indirizzare verso gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature inferiori a 5 °C e superiori a 50 °C. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Usare solo in ambienti ventilati. In caso di ingestione o erogazione negli occhi, consultare immediatamente un servizio di assistenza medica o centro antiveneni e fornire le informazioni sul prodotto riportate in etichetta. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato 125 ml