

KIT ACCESSORI DI RICAMBIO PER AEROSOL ALVITA 7 PEZZI

Marchio: -
Codice Min.: 934297553
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Alvita kit accessori aerosol Descrizione La dotazione dell'apparecchio comprende: - tubo di collegamento; - nebulizzatore (parte superiore e inferiore); - nasale pediatrico; - nasale adulto; - boccaglio; - mascherina adulto in bi-materiale; - mascherina pediatrica in bi-materiale. Modalità d'uso Prima di ogni utilizzo, pulire l'ampolla e gli accessori. Si consiglia un uso personale dell'ampolla e degli accessori per evitare eventuali rischi di infezione da contagio. Aprire l'ampolla ruotando la parte superiore in senso antiorario. Versare il medicinale prescritto dal medico nella parte inferiore. Chiudere l'ampolla ruotando la parte superiore in senso orario. Collegare gli

accessori come indicato nello schema di collegamento. Sedersi comodamente tenendo in mano il nebulizzatore, appoggiare il boccaglio alla bocca oppure utilizzare il nasale o la mascherina. In caso di utilizzo dell'accessorio mascherina, appoggiarla al volto, con o senza l'utilizzo dell'elastico. Mettere in funzione l'apparecchio azionando l'interruttore e inspirare ed espirare profondamente. Terminata l'applicazione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina. Dopo l'uso pulire l'ampolla e gli accessori. Se durante l'uso dell'ampolla si forma un evidente deposito di umidità all'interno del tubo, staccare il tubo dall'ampolla ed asciugarlo con la ventilazione del compressore stesso; questa azione evita possibili proliferazioni di muffe all'interno del tubo. Istruzioni per la pulizia Per la pulizia dell'apparecchio e dell'esterno del tubo utilizzare solo un panno inumidito con detergente antibatterico (non abrasivo e privo di solventi di qualsiasi natura). Per la pulizia degli accessori aprire il nebulizzatore ruotando la parte superiore, poi smontarlo come indicato nello schema di collegamento. Prima e dopo ogni utilizzo, sanificare l'ampolla e gli accessori scegliendo uno dei metodi come di seguito descritto. Metodo A (per tutti gli accessori): pulire gli accessori sotto acqua calda (circa 40°C) potabile con detergente delicato per piatti (non abrasivo) o in lavastoviglie con ciclo a caldo. Metodo B (per tutti gli accessori): pulire gli accessori mediante immersione in una soluzione con il 60% di acqua ed il 40% di aceto bianco, infine risciacquare abbondantemente con acqua calda (circa 40°C) potabile. Metodo C (per nebulizzatore, nasale pediatrico, nasale adulto e boccaglio): pulire gli accessori mediante bollitura in acqua per 20 minuti; è preferibile l'utilizzo di acqua demineralizzata o distillata per evitare depositi calcarei. Dopo aver pulito gli accessori scuoterli energicamente ed adagiarli su un tovagliolo di carta, oppure in alternativa asciugarli con un getto d'aria calda (per esempio asciugacapelli). Avvertenze Questo è un dispositivo medico e deve essere utilizzato con farmaci prescritti o raccomandati dal vostro medico. Prima di utilizzare gli accessori consultate il manuale istruzioni d'uso dell'apparecchio. È importante che il paziente legga e comprenda le informazioni per l'uso. Contattate il vostro rivenditore o centro di

assistenza per qualsiasi domanda. La vita media prevista degli accessori è di 1 anno comunque è consigliabile sostituire l'ampolla ogni 6 mesi negli utilizzi intensivi (o prima se l'ampolla è ostruita) per garantire sempre la massima efficacia terapeutica. In presenza di bambini e di persone non autosufficienti, l'apparecchio deve essere utilizzato sotto la stretta supervisione di un adulto che abbia letto il presente manuale. Alcuni componenti dell'apparecchio hanno dimensioni tanto piccole da poter essere inghiottite dai bambini; conservate quindi l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.