

LEVORAG EMULGEL CREMA 20 TUBETTI MONODOSE 3,5 ML

Marchio: -
Codice Min.: 931382764
Link: [clicca qui per acquistare](#)



LEVORAG EmulGel Descrizione Dispositivo medico costituito da una crema gel in tubetti monodose da 3,5 ml con applicatore incorporato. Ha proprietà emollienti, lubrificanti, filmogene, lenitive e protettive. Viene utilizzato come coadiuvante nel trattamento sintomatico e asintomatico delle ragadi anali. Il dispositivo crea un film sulle ragadi anali che consente di preservare un microambiente protetto da microrganismi esterni. La parte oleosa della formulazione contribuisce a lubrificare la zona interessata al trattamento facilitando l'espulsione fecale e prevenendo pertanto la formazione di ulteriori microlesioni.

Contribuisce ad alleviare il dolore defecatorio, a prevenire la formazione di ulteriori ragadi, a proteggere la zona trattata creando un ambiente favorevole alla guarigione delle ragade e sfavorevole all'attecchimento batterico. I principi di origine naturale contenuti contribuiscono ad un rapido benessere ed al ripristino delle condizioni fisiologiche ottimali. Non contiene cortisone, anestetici, profumo, coloranti e nichel. Componenti Aqua, dimethicone, glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, phenyl trimethicone, Borago officinalis seed oil, Malva sylvestris extract, panthenol, dextrin, hydrolyzed Hibiscus esculentus extract, phenoxyethanol, glyceryl stearate, cetyl alcohol, PEG-75 stearate, acrylated/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, triethanolamine, tocopherol, caprylyl glycol, 1,2-hexanediol, Calendula officinalis extract, maltodextrin, Glycyrrhiza glabra extract, ceteth-20, steareth-20, ethylhexylglycerin, sodium carboxymethyl beta-glucan, trisodium ethylenediamine disuccinate, tropolone, aspartic acidm sodium chloride, sodium bromide. Modalità d'uso Detergere accuratamente la zona da trattare, si consiglia l'uso di Deliclin salviette igienizzanti. Rimuovere il tappo situato all'estremità dell'applicatore. Afferrare il tubetto e introdurre delicatamente l'applicatore nell'orifizio anale, evitando di inserire completamente la cannula, premere a fondo il serbatoio per erogare l'intero contenuto del tubetto. Un contenitore monodose serve per un'applicazione. Applicare due monodose al giorno, per almeno 20 giorni consecutivi, salvo diversa indicazione del medico, preferibilmente mattino e sera, possibilmente dopo l'evacuazione delle feci. Avvertenze In caso di reazioni indesiderate, sospendere il trattamento e consultare il medico. Evitare l'utilizzo di disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di cicatrizzazione. Attualmente non sono conosciute controindicazioni all'utilizzo dei componenti contenuti in LEVORAG in gravidanza o allattamento, cautelativamente se ne consiglia l'utilizzo sotto diretto controllo del medico curante. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se i disturbi persistono dopo il trattamento, si consiglia di consultare il medico. Non utilizzare se la confezione originale appare danneggiata o aperta. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata

verso uno o più componenti del prodotto. Qualora dovessero verificarsi reazioni inaspettate, interrompere il trattamento e rivolgersi al medico. Non applicare il dispositivo in zone trattate contemporaneamente con altre pomate o disinfettanti. L'utilizzo improprio del dispositivo può determinare una ritardata riparazione tissutale impedendo il fisiologico processo di guarigione. Si sconsiglia l'utilizzo su pazienti affetti da: - Stipsi espulsiva con necessità di straining prolungato o manovre manuali durante l'evacuazione; - Presenza di incontinenza fecale. Conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza è indicata sulla scatola e su ogni singolo monodose, non utilizzare il prodotto oltre la data indicata. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Formato Confezione da 20 tubetti monodose con applicatore da 3,5 ml. Cod. 830011