

## MENOCOMPLEX GEL VAGINALE TUBO 30 ML + 6 APPLICATORI

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 927148751  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



MenoComplex Gel Vaginale Composizione Dispositivo medico per il trattamento della secchezza vaginale. Gel lubrificante privo di ormoni. Grazie all'elevato contenuto di acido ialuronico, alla presenza di estratto di Centella asiatica ed al polycarbophil, svolge azione protettiva ed emolliente della mucosa vaginale migliorandone il turgore. Utile anche come coadiuvante in caso di vaginite atrofica post-menopausa: coadiuva i processi di riepitelizzazione in caso di microlesioni che possono provocare bruciare bruciore, prurito o dolore anche durante i rapporti sessuali. Modalità d'uso 1 applicazione vaginale al giorno per 6 giorni consecutivi, successivamente 1 applicazione ogni 3 giorni o secondo parere medico.

Forare il tubo utilizzando il perforatore del tappo di chiusura. Avvitare un applicatore vaginale. Premere il tubo sino al riempimento totale dell'applicatore. Svitare l'applicatore dal tubo, introdurlo in vagina e premere il pistone fino al termine della sua corsa. Estrarre l'applicatore e lo stantuffo, le cannule sono monouso (gettare la cannula dopo l'utilizzo). Componenti Centella asiatica fosfolipidi, sodio ialuronato, glicerolo vegetale, polycarbophil, acqua, idrossietilcellulosa, sodiodeidroacetato, EDTA disodico, imidazolidinil urea, sodio lattato, sodio idrato. Avvertenze L'applicatore (cannula) è monouso. Gettare la cannula dopo l'applicazione. Lavarsi le mani prima e dopo l'uso. Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Non ingerire. Non usare in caso di ipersensibilità accertata verso uno dei componenti del prodotto. Uso topico. Non utilizzare in caso di lesioni. La compatibilità con i profilattici non è stata dimostrata. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenza integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare al riparo dalla luce in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Formato Tubo da 30 ml con 6 cannule monouso per l'applicazione vaginale del dispositivo.