

NGF STIMULATOR SOLUZIONE SALINA ISOTONICA NASALE 150 ML

Marchio: -
Codice Min.: 982508867
Link: [clicca qui per acquistare](#)



NGF STIMULATOR Descrizione Dispositivo Medico Classe I (Direttiva 93/42/CEE). Non sterile. NGF Stimulator provvede a una delicata neuro-stimolazione fisica dei filamenti olfattivi e, attraverso il richiamo dei mastociti sulla mucosa nasale e alla loro degranolazione, all'induzione della produzione di neurotrofine NGF e Serotonina, che possono trovare indicazioni utili nell'attenuazione e recupero dei sintomi causati da neuropatie dei nervi sensoriali cranici e nei casi di alterazioni dei cicli sonno-veglia e dell'umore. Il dispositivo agisce anche come lavaggio del naso e dei seni paranasali eliminando l'eccesso di muco dalle vie aeree superiori, utile in caso di allergie, sinusiti e ad azione preventiva delle otiti. I parametri di uso e di erogazione sono protetti da brevetti Usa ed Europei. Indicato per: Trattamento e prevenzione di Acufeni; Ipoacusia neurosensoriale alla nascita, mono o bilaterale, con situazione stabile o progressiva;

Deficit di attenzione, apatia, faticabilità mentale; Disturbi dell'umore, depressione, riduzione della libido; Malattie neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson e prevenzione; Raffreddore, Asma, Infezioni da virus respiratori; Riniti, Sinusiti, Otitis, Rinite allergica. Modalità d'uso Uno spruzzo di NGF Stimulator in una narice, quindi chiudere la narice opposta premendo con l'indice sulla parete laterale nasale, a bocca chiusa, e compiere dieci respirazioni profonde. Farlo subito dopo analogamente, dalla narice opposta. Dopo 5 minuti circa, ripetere la procedura in entrambi i lati. Farlo due volte al giorno per il periodo prescritto. Nel caso di Acufeni, di ipoacusia neurosensoriale progressiva, di malattie neurodegenerative, di disturbi depressivi, la terapia può essere portata avanti per anni (malattia cronica = terapia cronica). Nel caso di riniti, sinusiti, otiti, il trattamento può essere continuato in associazione con altre medicine prescritte dal medico, fino alla scomparsa dei sintomi. Componenti Soluzione salina isotonica. Avvertenze Il trattamento è efficace per stimolazione nasale ed ha parametri di erogazione brevettati e testati. Non deve essere assolutamente utilizzato nei condotti uditivi esterni. Non utilizzare se la confezione non è integra. Non utilizzare dopo la data di scadenza. La bombola può essere conservata a temperatura ambiente. NGF Stimulator si basa sull'erogazione spray con specifici parametri fisici costanti, di una soluzione fisiologica naturale, per stimolare la produzione autogena di Neurotrofine e di Serotonina. Pertanto è una terapia che può essere prolungata per lunghi periodi, senza rischio di significativi effetti collaterali. È possibile un piccolo sanguinamento nasale in soggetti predisposti. In quel caso si può interrompere il trattamento dal lato irritato e riprenderlo dopo 5-7 gg. Se il fastidio si ripresenta entro 7-10 giorni, interrompere il trattamento dal lato interessato. Recipiente sotto pressione, può scoppiare se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C. Controindicato in persone che assumono

anticoagulanti. L'utilizzo va evitato in caso di tendenza all'epistassi (sanguinamento dal naso). I trattamenti non devono essere effettuati in presenza di infiammazione acuta, neoformazioni o lesioni nasali. Non sono note incompatibilità con altri prodotti o farmaci. Si controindica l'uso della terapia con NGF Stimulator in persone precedentemente operate di chirurgia nasale. Conservazione Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 45°C, al riparo da raggi solari e dall'umidità. Formato Flacone da 150 ml.