

## PEGINPOL MICROCLISMA PED 6 MICROCLISMI DA 6 G

**Marchio:** STEVE JONES  
**Codice Min.:** 984598538  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**PEGinpol** Descrizione Dispositivo medico in classe II A. dispositivo medico monouso a base di Macrogol 4000 e miele per utilizzo rettale in microclisma, indicato per facilitare l'evacuazione in caso di stipsi. Il Macrogol 4000 è un polimero dotato di attività lubrificanti ed emollienti che esercita un'azione lassativa grazie al suo meccanismo consistente nel richiamare acqua nelle feci, ammorbidendole e provocando la peristalsi e l'evacuazione intestinale. Anche il miele, con le sue proprietà mucosimili, è in grado di richiamare acqua a livello rettale, esplicando un'azione emolliente ed umettante. PEGinpol è indicato nel trattamento della stipsi, anche in presenza di colon irritabile, emorroidi e ragadi. Modalità d'uso 1 microclisma quando necessario o secondo prescrizione

medica. Togliere il copricannula piegandolo alla base. Lubrificare la cannula con una goccia della stessa soluzione ed introdurla nel retto, quindi premere il bulbo. Al termine della somministrazione, estrarre la cannula tenendo premuto il bulbo e gettare il contenitore vuoto. Componenti PEG 4000 e miele. Conservanti: alcool benzilico e acido deidroacetico. Avvertenze - Per il corretto utilizzo del prodotto seguire le informazioni riportate sul foglio illustrativo. - In caso di stipsi persistente e importante consultare il medico per escludere altre patologie. - Utilizzare per massimo 30 giorni consecutivi. - Il microclisma è monouso, pertanto non deve essere riutilizzato qualora se ne somministri solo metà. - Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. - Non utilizzare PEGinpol dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. - La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Conservazione Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Formato Confezione da 6 microclismi monouso. Cod. 3087