

RETE TUBOLARE ELASTICA PER PIEDE E BRACCIO MEDIPRESTERIL CALIBRO 2 4M TESI

Marchio: -

Codice Min.: 923212676

Link: [clicca qui per acquistare](#)



mediPresteril Dispositivo medico CE monouso, non sterile. Reti tubolari elastiche per fissare e mantenere le medicazioni. Grazie alla particolare elasticità, non comprime e lascia liberi dai movimenti. Elastica, non comprime le pelli delicate e lascia liberi nei movimenti. Resiste all'acqua e alle pomate. Dermatologicamente testata. Modalità di utilizzo Tagliare alcuni centimetri e posizionare dove necessario, seguendo il profilo della parte medicata. La rete si stabilirà da sola. Verificare che, con il movimento, la rete non scivoli, non sia sottoposta ad eccessive trazioni e non danneggi la medicazione. Per la medicazione del cordone ombelicale: pulire e disinfettare accuratamente l'ombelico prima di applicare la compressa di garza. Allargare una striscia con le due mani ed infilare la

rete sul corpo del neonato. Sfilare le mani mantenendo leggermente premuta la medicazione ombelicale, verificare che la rete non scivoli, o venga sottoposta ad eccessive trazioni così da non danneggiare la medicazione stessa. Sostituire la compressa di garza almeno una volta al giorno. Componenti - 71% poliammide. - 29% elastomero. Formato - Rete tubolare elastica dito 4 metri (tesi) calibro 0. - Rete tubolare elastica mano/polso 4 metri (tesi) calibro 1. - Rete tubolare elastica piede/braccio 4 metri (tesi) calibro 2. - Rete tubolare elastica gamba/ginocchio 4 metri (tesi) calibro 3. - Rete tubolare elastica coscia/testa 4 metri (tesi) calibro 4. - Rete tubolare elastica torace 4 metri (tesi) calibro 5. - Rete tubolare elastica baby 4 pezzi + garze sterili 4 pezzi. Cod. P0180 / P0181 / P0182 / P0183 / P0184 / P0185 / P0186