

RIPARA DENTIERE BONYPLUS

Marchio: -
Codice Min.: 927239703
Link: [clicca qui per acquistare](#)



BONYPLUS RIPARA DENTIERE Descrizione Sistema per riparare la dentiera in caso di emergenza, adatto a dentiere estraibili in resina sintetica. Solo per uso temporaneo: rivolgersi al proprio dentista per una riparazione definitiva. Perfezionato da esperti dentali, è un sistema di riparazione semplice e facile da effettuare fuori dalla bocca. Se usato propriamente, la dentiera non si romperà di nuovo nello stesso posto. Questo metodo unico e flessibile permette un pre-fissaggio ed un'accurata riparazione della dentiera prima del fissaggio finale. I componenti sono largamente utilizzati in campo dentale. Avvertenze

L'adesivo di Ethyl Cyanoacrilate ha un'azione molto forte e rapida. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle lavare con abbondanza di sapone e acqua. In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, informare il medico. Il liquido Methyl Methacrylate può causare una reazione allergica alla pelle. Questo prodotto è facilmente infiammabile. Non fumare durante la riparazione. Non effettuare la riparazione vicino a fiamme. Il liquido può causare irritazione alla pelle o alle vie respiratorie: evitare di inalare i vapori. La polvere Poly Methyl methacrylate Co-polymer, evitare di inalare la polvere. Formato Il set contiene: - 1 tubo di adesivo di cyanoacrylate 2 g; - 1 fiala di liquido di methyl methacrylate 2,10 ml; - 1 fiala di polvere di poly methyl methacrylate co-polymer 1,80 g; - 1 spatola; - 1 vaschetta miscelatrice; - 1 pezzo di carta smerigliata; - Foglietto di istruzioni; - 1 dito di guanto in lattice; Cod. 28016