

SACCA DA LETTO PER RACCOLTA URINA DA 2 LITRI CON SCARICO TUBO 130 CM 10 PEZZI

Marchio: -
Codice Min.: 974844805
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Sacche urina da letto con scarico Descrizione Sacche da letto per la raccolta di urina, non sterili, prodotte in PVC medicale. Affidabili e sicure, disponibili con rubinetto di scarico tipo Pull-Push e valvola anti-reflusso. Disponibile sia nella confezione da 30 pezzi, sia nella confezione da 10 pezzi per ottimizzare la distribuzione agli utilizzatori da parte della Farmacia. Affidabili e sicure per l'elevata qualità. Produzione Europea. -Capacità: 2 litri. -Sacca in PVC, graduata da 100 a 2.000 ml. -Tubo in PVC anti-schiacciamento. -Lunghezza tubo: 130 cm. -Valvola anti-reflusso in PVC lungo tutta la larghezza. -Rubinetto di scarico in PELD, tipo Pull-Push. -Dispositivi privi di lattice e ftalati. Modalità d'uso Estrarre la sacca dalla confezione multipla e controllare lo stato dei vari componenti: in caso si riscontrassero danneggiamenti e/o anomalie, gettare la sacca e usarne un'altra.

Dopo la verifica dello stato del prodotto, controllare che la valvola di scarico sia ben chiusa. 1) Applicare il reggisacca (non in dotazione) alla sponda del letto e connettervi la sacca utilizzando gli appositi fori posti sulla parte superiore del prodotto. Assicurarsi che il reggisacca e la sacca siano ben connessi tra loro per prevenire eventuali distacchi della sacca stessa. 2) Collegare il connettore del tubo della sacca al catetere. 3) Per un uso corretto della sacca si consiglia di svuotarla di volta in volta, evitando che il livello di urina superi la capacità totale della sacca. 4) Controllare le condizioni della valvola di scarico. La valvola di scarico è aperta quando è abbassata ed è chiusa quando è sollevata. Per una perfetta chiusura della valvola, premerla fino in fondo, fino a sentire lo scatto (clic). Avvertenze La sacca urina è un dispositivo medico monouso: il riutilizzo espone al rischio di infezioni e gravi danni all'utilizzatore. La scala graduata è puramente indicativa: il dispositivo non ha funzione di misura. Non si è a conoscenza di effetti collaterali o controindicazioni in caso di corretto utilizzo del dispositivo. Conservazione Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. Per lo smaltimento: - utilizzare guanti protettivi -svuotare la sacca prima di smaltirla -smaltire dopo il primo utilizzo secondo le disposizioni di legge vigenti -il riutilizzo comporta la perdita delle prestazioni del prodotto e la possibile contaminazione del paziente. Validità a confezionamento integro: 60 mesi. Formato Disponibili in confezioni da 30 e 10 pezzi.