

SACCA DA LETTO PER RACCOLTA URINA DA 2 LITRI SENZA SCARICO TUBO 130CM 30 PEZZI

Marchio: -
Codice Min.: 902176914
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Sacca urina da letto senza scarico Sacca urina da utilizzare esclusivamente per la raccolta e lo smaltimento dell'urina nei pazienti allettati. Dispositivo monouso, non destinato alla misura ed alle prove di laboratorio. L'indicazione del volume è approssimativa. Sacca prodotta in PVC contenente ftalati e priva di lattice di gomma. Modalità d'uso Prima dell'utilizzo, controllare l'integrità e la data di scadenza del prodotto (il produttore non risponde di una cattiva conservazione e dell'uso improprio del prodotto). La sacca deve essere collocata in basso nell'apposito sostegno, in posizione verticale e con il tubo di collegamento rivolto verso l'alto. Durante l'utilizzo evitare piegature o schiacciamenti della sacca e del tubo. Evitare il contatto con solventi chimici e l'esposizione a fonti di calore durante la conservazione. Non manipolare con utensili taglienti o appuntiti. Espellere l'aria

eventualmente presente all'interno della sacca prima dell'utilizzo. Conservazione Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. Per lo smaltimento: -utilizzare guanti protettivi -svuotare la sacca prima di smaltirla -smaltire dopo il primo utilizzo secondo le disposizioni di legge vigenti -il riutilizzo comporta la perdita delle prestazioni del prodotto e la possibile contaminazione del paziente. Formato Capacità: 2 litri. Lunghezza tubo: 130 cm oppure 90 cm. Diametro tubo interno: 6,1 mm. Diametro tubo esterno: 8,8 mm. Disponibili in confezioni da 30 oppure 10 pezzi.