

## SCHOLL PLANTARE LOMBARE M 2 PEZZI

**Marchio:** SCHOLLS  
**Codice Min.:** 981043298  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Scholl ZONA LOMBARE LOMBALGIA Descrizione nel plantari Sollievo Dolore di Scholl funzionano in 3 modi: 1. Aiutano ad assorbire gli urti che provocano tensioni alla parte inferiore del corpo. 2. Contornano i piedi distribuendo il peso in modo uniforme e riducendo la pressione. 3. Aiutano a stabilizzare la posizione del piede sostenendo il modo di camminare. Sono Dispositivi Medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Autorizzazione del 10/09/2020 Modalità d'uso Prima dell'uso controllare che il prodotto si adatti bene alla scarpa. L'estremità del plantare dovrebbe trovarsi alla base delle dita dei piedi; in questo modo il plantare potrebbe non toccare la parte posteriore della scarpa. Per alcune persone, i plantari Sollievo Dolore possono richiedere del tempo per risultare comodi. I piedi devono abituarsi alle proprietà strutturali del plantare, quindi potrebbe essere utile un periodo

di interruzione dall'uso. Se necessario, aumentare gradualmente il numero di ore di utilizzo giornaliero fino a quando non si potranno indossare tutto il giorno. Formato Una confezione contiene 2 plantari Sollievo Dolore per piedi piatti Taglie disponibili: S (37/39,5) M (40/42) L (42,5/45) Cod. 3144872 (Taglia S)3144874 (Taglia M)3144873 (Taglia L)