

SOLUZIONE FISIOLOGICA ISOTONICA STERILE NASIR IN SCATOLA CON 10 SACCHE VERSIONE LUER LOCK DA 250ML

Marchio: -
Codice Min.: 912125022
Link: [clicca qui per acquistare](#)



NAS-IR Lavaggio Nasale Soluzione isotonica Dispositivo medico CE 0476 di irrigazione nasale, indicato per l'igiene quotidiana tramite la doccia delle mucose nasali, allo scopo di prevenire ostruzioni dovute a ristagno di secrezioni di catarro o per coloro che soffrono di difficoltà respiratorie dovute a patologie quali: raffreddore, tosse, sinusiti, decorsi post-operatori, otite, asma, bronchiti, poliposi nasali, allergeni o causate da contaminazioni ambientali quali polveri, fumo o esalazioni. Coadiuvante nella terapia dell'ostruzione nasale notturna. Destinazione d'uso Il dispositivo consente di far defluire per gravità o pressione manuale la soluzione fisiologica sterile ed apirogena (isotonica) contenuta in sacche da 250 o da 500 ml, all'interno delle cavità nasali (vie aeree superiori).

Tale dispositivo possiede ad una estremità un ugello irrigatore che indirizza il getto di soluzione fisiologica verso i meati delle cavità nasali esercitando una potente azione detergente nelle cavità stesse e nel rinofaringe, favorendo la rimozione all'esterno di tutte le secrezioni, polveri, allergeni e sostanze chimiche eventualmente presenti. Posologia Per adulti e bambini (sopra i 3 anni) si consigliano da 1 a 2 irrigazioni al giorno o secondo diversa specifica medica. Istruzioni d'uso - Rimuovere con attenzione la prima busta di protezione della sacca. - Intiepidire la sacca con la soluzione a 30-35°C circa, immergendola in acqua calda. Quindi togliere, svitandolo, il tappino di protezione. - Fissare la ventosa su una superficie liscia sopra il lavandino. - Aprire la confezione contenente il dispositivo. - Abbassare la rotellina del roller fino ad occludere completamente il tubo. - Togliere il tappo ed avvitare con decisione il raccordo maschio del dispositivo. Tenendo fra le dita il raccordo, con l'altra mano rompere il cono a frattura (parte a punta di freccia) per attivare la connessione sacca-dispositivo. - Appendere la sacca alla ventosa fissandola opportunamente. - Inclinare la testa in avanti sul lavandino in posizione più bassa rispetto alle spalle. - Portare l'ugello irrigatore al naso e premere delicatamente sulla narice. Respirare attraverso la bocca durante tutto il trattamento. - Alzare circa a metà la rotellina del roller poi regolarla in modo che la soluzione defluisca delicatamente senza andare in gola. - Circa a metà trattamento, eventualmente, cambiare narice. Materiali Tale dispositivo, fornito in blister singolo sterile, è costituito da: - n° 1 raccordo Luer lock maschio in ABS; per la connessione alle sacche (raccordi Luer lock femmina); - n° 1 tubo in PVC morbido NO-DOP (senza Ftalati), diametro 3,5 x 5,5 x 500 mm; - n° 1 roller (corpo + ruotino) in PP; per la regolazione del tubo / flusso; - n° 1 erogatore / ugello in ABS. Formato Confezionamento singolo: blister in accoppiato carta / PE.