

## SOLUZIONE OTOLOGICA BIOGREEN OTO SPRAY RIMOZIONE E DISSOLUZIONE CERUME 13 ML

**Marchio:** BIOGREEN  
**Codice Min.:** 905123042  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Biogreen Oto spray Descrizione Dispositivo Medico Classe I. Indicato per l'eradicazione e/o dissoluzione del tappo di cerume nel condotto uditivo esterno. A seconda del tempo di posa, Biogreen Oto Spray è in grado di dissolvere od ammorbidire il tappo di cerume facilitandone l'estrazione da parte del medico specialista. Biogreen Oto Spray è adatto all'uso ambulatoriale da parte del medico generale o specialista per la rimozione del tappo di cerume. Grazie alla sua facile metodica applicativa, Biogreen Oto Spray può essere utilizzato autonomamente dal paziente per la dissoluzione del tappo di cerume oppure come trattamento preparatorio alla rimozione del tappo da parte del medico. Biogreen Oto Spray è utile, oltre per la dissoluzione e/o rimozione, anche come

trattamento preventivo alla formazione del tappo di cerume in pazienti predisposti o con eccessiva produzione di cerume, per portatori di protesi auricolari o per chi pratica sport acquatici. Si consiglia l'uso del prodotto: se si è in presenza di un tappo di cerume; se si vuole mantenere una corretta fisiofunzionalità del Condotto Uditivo Esterno; per la prevenzione in soggetti che praticano sport acquatici; per la prevenzione in soggetti con predisposizione per eccessiva produzione di cerume; per i portatori di protesi. Modalità d'uso Porre il capo, con una inclinazione di circa 35/40°, verso il lato opposto all'orecchio da trattare. Se il paziente è presso la propria abitazione, utilizzare un cuscino e/o il bracciolo del divano, appoggiare il capo avendo cura di posizionare il padiglione auricolare da trattare parallelamente all'appoggio. Agitare il flaconcino erogatore del Biogreen Oto Spray. Togliere la custodia del beccuccio erogatore. Praticare dalle 2 alle 3 compressioni sulla pompetta per consentirne il riempimento. Posizionare il beccuccio erogatore in prossimità del condotto uditivo esterno. Erogare 8/10 spruzzi (1 ml circa) nell'orecchio, attendere 5/10 secondi circa ed esercitare a seguire una leggera trazione verso il basso del lobo dell'orecchio interessato, alternata con una media compressione sul trago. Detta operazione viene raccomandata per permettere alla soluzione del Biogreen Oto Spray di raggiungere tutte le parti del condotto uditivo. Ripetere, subito a seguire, l'erogazione di altri 8/10 spruzzi, senza eliminare la soluzione precedentemente introdotta. Si consiglia di massaggiare il trago, anche se non in modo continuativo, durante l'attesa del processo di dissoluzione. Procedere infine ad accurato lavaggio dopo l'attesa di 45 minuti, avvalendosi di una pompetta di materiale duttile, con acqua tiepida, predisponendo l'inclinazione del capo e dell'orecchio per la fuoriuscita del cerume disciolto. È consigliabile ripetere il trattamento con soli 8/10 spruzzi di Biogreen Oto Spray nei 2/3 giorni a seguire, lasciando agire il prodotto per soli 10 minuti e procedere poi con il lavaggio. Detta operazione, non indispensabile, è consigliata per una sicura e più accurata pulizia ed igienizzazione del condotto trattato.

Disinfettare, pulire e chiudere accuratamente il beccuccio erogatore con la relativa custodia dopo l'utilizzo. Biogreen Oto Spray può essere utilizzato dal medico specialista come trattamento preparatorio all'estrazione del tappo di cerume. Erogare 8/10 spruzzi di Biogreen Oto Spray nel condotto uditivo esterno e lasciare agire circa 15 minuti. Procedere alla rimozione del tappo tramite aspirazione. Per una valida prevenzione è sufficiente erogare 4 spruzzi per orecchio (mattina e sera) per tre/quattro giorni consecutivi, ripetendo l'applicazione nei mesi a seguire secondo parere medico. In caso di presenza di protesi acustiche: rimuovere gli apparecchi acustici; erogare il Biogreen Oto Spray nel condotto uditivo; una volta completamente asciutto il condotto uditivo esterno, riapplicare la protesi. Il prodotto è utilizzabile sino alla scadenza se le modalità di pulizia e conservazione sono state perfettamente eseguite. Si consiglia di intiepidire la soluzione del Biogreen Oto Spray onde evitare, in soggetti particolarmente sensibili, disagi sensoriali. Componenti Tabebuia Avellanadae Bark Extract, Methylparaben, Propylparaben, Sodium Benzoate. Avvertenze Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. In pazienti con "preesistente lesione timpanica", prima di utilizzare il Biogreen Oto Spray consultare ed attenersi al parere del medico specialista. Nei casi in cui il tappo di cerume risultasse decisamente incapsulato da lamelle di epidermide esfoliata, la soluzione del Biogreen Oto Spray, non espletando attività cheratolitica, non è in grado di agire sul cerume ma solo favorirne l'estirpazione agendo sulle connessioni delle pareti. Detto intervento dovrà essere effettuato solo e soltanto dal medico specialista. La presenza di possibili "particelle biancastre" presenti nel liquido del cerume dissolto, è rappresentata da lamelle di epidermide esfoliata, prive di vitalità, che quasi sempre si ritrovano negli elementi che compongono il tappo di cerume. La loro presenza è indice del fisiologico e non lesivo comportamento della soluzione del Biogreen Oto Spray verso l'epitelio del condotto auricolare esterno. Non utilizzare il prodotto in pazienti con patologie dell'orecchio (otiti). Non utilizzare il prodotto in pazienti con otorrea. Non utilizzare in presenza di sanguinamento del canale uditivo. Non sono noti effetti collaterali o interazioni con altri farmaci in seguito ad applicazione topica di Biogreen Oto Spray. Conservazione Conservare a temperatura inferiore a 25°C, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità. Validità a confezione integra: 36 mesi. Formato Flacone da 13 ml con erogatore spray. Cod. EUPH0021