

## SPRAY AURICOLARE OTOBOR 50ML

**Marchio:** Stewart Italia  
**Codice Min.:** 938699182  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Otorbor SPRAY AURICOLARE Dispositivo medico utile nell'igiene specifica della cavità auricolare nonché per la rimozione degli eccessi di cerume riducendo così i rischi di proliferazioni batteriche e micotiche nel canale auricolare. Modalità d'utilizzo 2-3 spruzzi per cavità auricolare, secondo le necessità o consiglio medico. Può essere usato più volte al giorno. Se necessario, immergere il flacone in acqua tiepida per qualche minuto; togliere il cappuccio di protezione dell'erogatore; sciacquare l'erogatore prima dell'utilizzo; inclinare il busto e ruotare la testa di 45°, introdurre l'imboccatura dell'erogatore all'ingresso della cavità dell'orecchio e premere una o più volte fino a farne uscire la quantità desiderata; trazionare il padiglione auricolare verso l'alto e indietro per

raddrizzare il condotto uditivo esterno (CUE); attendere qualche secondo per far agire la soluzione, sollevare la testa ed asciugare il liquido in eccesso; pulire l'erogatore; rimettere il cappuccio di protezione all'erogatore. Avvertenze Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Evitare di spruzzare negli occhi. In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale e/o di vertigini. L'uso da parte di più soggetti può facilitare la trasmissione di infezioni. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare il medico, al fine di istituire idonea terapia. E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo. Ipersensibilità accertata verso i componenti. Conservazione Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Non utilizzare se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Formato: Flacone in vetro da 50 ml, con erogatore spray.