

SPRAY IRRIGATORE PER LA RIMOZIONE DEL CERUME ANAURETTE 30 ML

Marchio: ANAURETTE
Codice Min.: 931961484
Link: [clicca qui per acquistare](#)



spray ANAURETTE Dispositivo medico CE, classe IIa. Spray per la prevenzione, dissoluzione e rimozione del cerume accumulato nel canale uditivo esterno di neonati al di sopra dei 3 mesi, bambini e adulti. Spray a base di sostanze di origine naturale, combina l'azione meccanica di lavaggio con l'azione del Fitosqualano, derivato dell'olio d'oliva, che aiuta a dissolvere i tappi di cerume. La formulazione in spray assicura la perfetta dispersione del prodotto nel canale uditivo. Modalità d'uso - 1-2 spruzzi in ciascun orecchio 3 volte al giorno, fino alla dissoluzione del tappo di cerume. - 1-2 spruzzi in ciascun orecchio una volta al giorno per prevenire la formazione dei tappi di cerume. 1. Ruotare il beccuccio erogatore. 2. Mantenere la testa dritta. 3. Premere per 1 secondo. 4.

Mantenere la testa dritta per 10 secondi. 5. Asciugare. 6. Pulire il beccuccio tenendolo sotto l'acqua calda (40°C) per 10 secondi. In caso di difficoltà nel direzionare il getto, tirare il lobo superiore dell'orecchio leggermente in alto e verso la parte posteriore della testa. Questa manovra consente agli ingredienti di raggiungere la parte più interna del canale uditivo. Avvertenze Uso esterno. Non deve essere usato in pazienti con timpano perforato. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non spruzzare negli occhi. Conservazione Conservare in luogo fresco, non esporre a temperature superiori a 50°C. Componenti Olio minerale; fitosqualano; olio essenziale di menta. Formato Flaconcino spray da 30 ml. Cod. 2010063