

STERILWET GARZA OFTALMICA 14 PEZZI

Marchio: BRUSCHETTINI
Codice Min.: 938112531
Link: [clicca qui per acquistare](#)



STERILWET Descrizione Dispositivo medico per adulti e bambini, particolarmente adatto alla detergenza perioculare, anche in situazioni di pre e post chirurgia oftalmica. Garza di cotone naturale imbevuta di una soluzione di estratti vegetali (Camomilla recutita, Euphrasia officinalis) e acido ialuronico, in grado di svolgere un'attività detergente, lenitiva, decongestionante, idratante e protettiva. Risulta efficace in caso di infiammazioni, infezioni, allergie, secrezioni oculari, manifestazioni infettive o anallergiche dovute a patologie di vario genere e per la detersione dell'occhio e delle zone circostanti. L'acido ialuronico sale sodico costituisce una componente fondamentale della matrice extra cellulare dei tessuti. Grazie alla sua capacità di trattenere acqua e al suo

potere filmogeno, esplica un'attività idratante e protettiva. Le sostanze funzionali detergono accuratamente la zona oculare e perioculare, rendendo STERILWET un ottimo dispositivo igienico utilizzabile anche durante terapie oculari prescritte dal proprio medico. La particolare attività detergente, idratante, protettiva ed emolliente viene garantita dalla composizione di STERILWET che risulta essere un prodotto estremamente delicato, soprattutto per le pelli e le zone più sensibili. Senza conservanti.

Modalità d'uso Dopo aver pulito le mani in modo adeguato, aprire la bustina ed estrarre la garza. Applicare la garza nella zona palpebrale, passandola delicatamente, in modo da permettere un'adeguata detersione, un'asportazione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (smog, pulviscolo, polveri, ecc.) e la funzione emolliente e lenitiva dei componenti del prodotto. Nel caso si presentassero secrezioni particolarmente persistenti o occlusione del canalicolo lacrimale, è consigliabile scaldare la busta chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40 °C) e utilizzare poi la garza come impacco caldo, massaggiando delicatamente. È inoltre possibile spremere il contenuto della garza sull'occhio, reclinando leggermente il capo, massaggiando successivamente con la garza fino a una rimozione completa dei residui presenti. Nel caso di flogosi è consigliabile raffreddare la bustina chiusa in frigorifero per qualche ora e applicare poi la garza aperta sull'occhio, mantenendola in loco per qualche minuto, come impacco freddo.

Componenti Garza di cotone 100%, imbevuta con 3 ml di soluzione: aqua, PEG/PPG-20/15 dimethicone, Chamomilla recutita flower extract, propylene glycol, Euphrasia officinalis extract, sodium hyaluronate, ammonium glycyrrhizate, caprylyl/capryl glucoside, sodium cocoyl wheat amino acids, ethylhexylglycerin, phenethyl alcohol, sodium chloride, sodium bicarbonate.

Avvertenze Monouso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La sterilità del prodotto è garantita solo dall'integrità della busta. Uso esterno. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. La funzionalità e la sicurezza del prodotto sono garantite esclusivamente dall'integrità della busta. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato
Confezione da 14 pezzi Cod. 41