

## STRISCE MISURAZIONE GLICEMIA ONETOUCH SELECT PLUS 25 STRISCE

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 926562861  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**ONE TOUCHSelect Plus Test strips** Descrizione Strisce reattive per misurare la glicemia. Forniscono risultati accurati in 5 secondi. Sono necessari piccoli campioni di sangue (1mc). Modalità d'uso: Inserire le strisce reattive nella porta delle strisce reattive con le barre di contatto rivolte verso il glucometro. Tenendo il dito steso e fermo, spostare lo strumento e la striscia reattiva verso la goccia di sangue. Toccare delicatamente il canale della striscia reattiva sul margine della goccia di sangue. Attendere che il canale di aspirazione si riempia completamente. La goccia di sangue verrà aspirata nel canale capillare e si dovrebbe riempire completamente.

**Conservazione** Conservare in luogo fresco e asciutto a una temperatura compresa tra 5 °C e 30 °C  
**Avvertenze**- Se vi è condensa (deposito di vapore acqueo) sul glucometro, non eseguire il test. Prima di eseguire il test spostare il glucometro e le strisce reattive in un luogo più fresco e asciutto e attendere che la superficie dello strumento si asciughi. - Non aprire il flacone delle strisce reattive finché non si è pronti a prelevare una striscia ed eseguire un test. Usare la striscia reattiva subito dopo averla estratta dal flacone, specialmente se ci si trova in ambienti con umidità elevata. - Chiudere saldamente il flacone subito dopo l'uso, per evitare contaminazione o danni. Conservare le strisce reattive inutilizzate esclusivamente nel loro flacone originale. - Non rimettere la striscia reattiva usata nel flacone dopo avere eseguito un test. - Non riutilizzare una striscia reattiva su cui sia stato applicato sangue o soluzione di controllo. Le strisce reattive sono esclusivamente monouso. - Non eseguire il test con una striscia reattiva piegata o danneggiata. - È possibile toccare la striscia reattiva in qualsiasi punto con mani asciutte e pulite. Non piegare, tagliare o modificare le strisce reattive in nessun modo. - Quando si apre un nuovo flacone di strisce reattive, verificare la data di scadenza. Formato Flacone con 25 strisce. Cod 023-299