

STRISCIA ADESIVA ANELASTICA CETILAR TAPE CM 4 X 2,5 M

Marchio: CETILAR
Codice Min.: 944898105
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Cetilar Tape Descrizione Cetilar è una striscia adesiva anelastica che, grazie alla sua formulazione a base di esteri cetilici (CFA) di origine vegetale, è indicata nel trattamento delle affezioni articolari su base osteoartritica, per migliorare la funzionalità articolare e la capacità di movimento, e per ridurre la sintomatologia dolorosa. Riduce il dolore articolare e muscolo-scheletrico rapidamente; è utile per il recupero della motilità nei periodi di riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori o traumi articolari; può essere utile in caso di traumi sportivi alle articolazioni per recuperare il naturale movimento. Modalità d'uso Aprire la confezione ed estrarre la striscia. Tagliare la striscia su misura in base alle necessità. Assicurarsi che la pelle sia pulita ed asciutta prima dell'applicazione. Applicare esercitando una lieve pressione per fare

aderire bene i bordi alla pelle. Mantenerlo in situ per 8 ore. Riporre il prodotto nella confezione. L'applicazione può essere ripetuta nella giornata lasciando areare per un breve periodo la superficie cutanea tra un'applicazione e l'altra per prevenire eventuali fenomeni di sensibilizzazione. La striscia adesiva utilizzata è monouso e non riutilizzabile. Componenti Acidi grassi cetilati di origine vegetale, copolimero acrilato, mentolo. Avvertenze Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Solo per uso esterno. Il prodotto va applicato solo su cute integra, pulita e asciutta. Evitare il contatto con mucose, occhi e bocca, nel caso lavare abbondantemente con acqua. Rimuovere la striscia adesiva durante bagno/doccia. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. Non utilizzare in caso di accertata ipersensibilità verso i componenti. Non ingerire. Non utilizzare se il confezionamento è danneggiato. Non utilizzare oltre la data di scadenza. Non impiegare Cetilar Tape contemporaneamente ad altri trattamenti topici impiegati sulla zona da trattare, senza aver consultato il proprio medico. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Nei bambini di età inferiore ai 12 anni consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, tra 5 °C e 40 °C. Formato Confezione contenente una striscia adesiva anelastica di 4 cm x 2,5 m. Cod. PH51