

VITAPOS POMATA OFTALMICA 5 G

Marchio: Omikron Italia
Codice Min.: 931962625
Link: [clicca qui per acquistare](#)



VitA-POS Descrizione Dispositivo Medico CE, classe IIa, a base di vitamina A. Pomata oftalmica sterile a base di vitamina A senza conservanti. Grazie alla sua particolare composizione si applica facilmente sulla superficie oculare. VitA-POS protegge la superficie oculare e stabilizza il film lacrimale. La vitamina A in essa contenuta è un costituente naturale del film lacrimale che favorisce una buona tollerabilità della pomata oftalmica e assicura la completa miscelazione con le lacrime. Allevia la sensazione di bruciore, secchezza o stanchezza oculare. Facilita infine lo scorrimento delle palpebre sulla superficie corneale e congiuntivale. Modalità d'uso Le pomate oftalmiche devono essere utilizzate evitando il contatto del beccuccio erogatore con l'occhio o

la cute. Svitare il tappo che copre il beccuccio erogatore. Il tappo è sigillato con un anello bianco che assicura l'integrità del tubo prima del primo utilizzo e quindi garantisce la sua sicurezza. Utilizzare VitA-POS solo se l'anello sigillante sul tubo risulta integro prima del primo utilizzo. Alla prima apertura il tappo è separato dall'anello sigillante bianco. Si prega di rimuovere l'anello sigillante dal tubo prima della prima applicazione della pomata oftalmica. Inclinare leggermente la testa all'indietro, abbassare lievemente la palpebra inferiore dell'occhio e, con una piccola pressione sul tubo, stendere una sottile striscia di pomata nel sacco congiuntivale. Chiudere lentamente le palpebre. Richiudere accuratamente il tubo dopo l'utilizzo. la frequenza di utilizzo dipende dalle proprie abitudini ed esigenze personali. VitA-POS può essere utilizzato in aggiunta alle gocce oculari lubrificanti e si applica generalmente una volta al giorno alla sera prima di andare a dormire. Per un utilizzo di VitA-POS con maggiore frequenza rivolgersi al proprio medico curante. Non sono previsti limiti di durata del trattamento. Avvertenze VitA-POS non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità individuale accertata verso uno dei componenti del prodotto. L'utilizzo del prodotto durante il giorno provoca una lieve alterazione della vista a causa della consistenza untuosa della pomata. In questo caso, si deve quindi evitare di guidare l'automobile, utilizzare macchinari o lavorare senza una base stabile. VitA-POS non deve essere utilizzato quando di indossano lenti a contatto. VitA-POS non deve essere utilizzato contemporaneamente ad altri prodotti farmaceutici oftalmici. In questi casi VitA-POS deve essere utilizzato almeno 30 minuti dopo l'applicazione di altri prodotti medicinali nell'occhio. Per erogare la pomata esercitare una lieve pressione sul tubo senza piegarlo e né avvolgerlo. Sulla base delle attuali acquisizioni VitA-POS può essere utilizzato anche nei bambini, nelle donne in stato di gravidanza o durante l'allattamento. utilizzare una confezione di VitA-POS per ogni singolo soggetto. Tenere VitA-POS fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare VitA-POS dopo la data di scadenza. Conservazione Conservare a temperatura ambiente (15-25°C). Validità a confezione integra: 36 mesi. Validità dopo la prima apertura: 6 mesi. Formato

Astuccio contenente 1 tubo in alluminio da 5 g.