

## VITAVISION UNGUENTO OFTALMICO 5 G

**Marchio:** OMNIVISION ITALIA  
**Codice Min.:** 980292282  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

**Vit-A-Vision** Descrizione Unguento oftalmico privo di conservanti che oltre a vitamina A, vitamina E e dexpanthenolo, contiene vaselina, paraffina viscosa, lanolina, alcool cetistearilico e acqua purificata. Vit-A-Vision viene utilizzato per il miglioramento duraturo del film lacrimale e per la protezione intensiva della superficie oculare. Le sue proprietà di protezione cellulare permettono la normale riepitelizzazione quando questa è compressa dalla secchezza. Grazie alla sua consistenza molto morbida ed elastica, Vit-A-Vision può essere distribuito molto bene sulla superficie oculare. L'unguento si caratterizza per la sua ottima tollerabilità, soprattutto grazie al contenuto in vitamina A, che è una componente naturale del film lacrimale. Vit-A-Vision allevia sintomi come bruciore, secchezza o stanchezza oculare. Le palpebre scorrono senza problemi sulla cornea e sulla congiuntiva. Le palpebre scorrono senza problemi sulla cornea e sulla congiuntiva. Il dexpanthenolo, che viene convertito in acido pantotenico nell'organismo, appartiene alle vitamine del gruppo B. Il dexpanthenolo aumenta la capacità di legare l'acqua, viene ben assorbito a livello cutaneo e ha proprietà curative. Vit-A-Vision fornisce un sollievo duraturo dai sintomi di secchezza, infiammazione e leggera irritazione, in particolare: -in presenza di stress ambientale, ad esempio da aria condizionata, vento o inquinamento atmosferico, ad esempio da fumo di sigaretta; -in caso di affaticamento e stress visivo causato da visione prolungata, ad esempio sullo schermo di un computer, al microscopio o in caso di lunghi viaggi in auto; -in condizioni di stress meccanico, causato ad esempio da lenti a contatto rigide o morbide o da procedure diagnostiche sull'occhio. Senza conservanti. Modalità d'uso Vit-A-Vision viene solitamente applicato 3 volte al giorno per un miglioramento duraturo del film lacrimale e una protezione intensiva della superficie oculare. Si consiglia in particolare di applicare l'unguento la sera, prima di andare a letto, in modo che possa avere un effetto intensivo e duraturo sugli occhi irritati. Svitare il cappuccio di protezione, reclinare la testa leggermente all'indietro, tirare la palpebra inferiore allontanandola leggermente dall'occhio. Premere lievemente sul tubetto e applicare circa 0,5 cm di unguento nel sacco congiuntivale. Chiudere lentamente gli occhi. Richiudere bene il tubetto dopo l'uso. L'applicazione dovrebbe proseguire per più di 30 giorni. Avvertenze Dopo l'applicazione, può verificarsi un temporaneo offuscamento della vista; in questo caso, non guidare veicoli, non azionare macchinari e attendere il ripristino della normale acuità visiva. Non utilizzare: nelle infezioni oculari; nell'ipersensibilità a uno dei componenti. Rivolgersi al proprio oculista se l'irritazione e l'infiammazione persistono. Vit-A-Vision non deve essere usato mentre si indossano le lenti a contatto. Se si utilizzano anche altri preparati oculari oltre a Vit-A-Vision, osservare un intervallo sufficiente di circa 30 minuti tra l'applicazione di Vit-A-Vision e quella degli altri preparati oculari. Non toccare l'occhio o la cute del viso con la punta del tubetto, per evitare infezioni o lesioni oculari. Evitare di piegare o arrotolare il tubetto, per non danneggiarlo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare a temperatura ambiente. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Può essere utilizzato per 3 mesi dopo l'apertura. Formato 5 g. Cod. MD5