

XAILIN GEL LUBRIFICANTE OCULARE 10 G

Marchio: XAILIN
Codice Min.: 934723242
Link: [clicca qui per acquistare](#)

Xailin Gel Dispositivo medico CE 0120, classe IIa. Gel oftalmico multidose per il sollievo prolungato dalla sensazione di secchezza oculare. Xailin Gel è usato per lubrificare e proteggere l'occhio in determinate condizioni oculari e offrire un sollievo prolungato dalla sensazione di secchezza oculare. Xailin Gel offre sollievo rinfrescante e calmante dalle sensazioni di secchezza oculare, quali dolore, irritazione o una sensazione di presenza di sabbia. I sintomi dell'occhio secco si verificano a seguito di disturbi della superficie oculare che possono essere causati da una serie di ragioni diverse, dove le lacrime normali sono di scarsa qualità o prodotte in quantità troppo scarsa per mantenere l'occhio sufficientemente umido. Xailin Gel può essere utilizzato da portatori di lenti a contatto, ma si raccomanda di rimuovere le lenti prima dell'uso. Modalità d'utilizzo Il dosaggio usuale è di una goccia da applicare da 2 a 4 volte al giorno secondo necessità, o come indicato dal proprio medico curante, il quale potrebbe consigliare di utilizzare questo prodotto diversamente. Non è richiesto un aggiustamento della dose nei bambini. Prima di aprire una nuova confezione di Xailin Gel, assicurarsi che l'anello di sicurezza posto sul tappo del tubo non sia rotto. 1. Ruotare il tappo in senso antiorario per rompere il sigillo 2. Lavare e asciugare bene le mani prima dell'uso 3. Rimuovere il cappuccio esterno 4. Se si è portatori di lenti a contatto, rimuovere le lenti 5. Inclinare la testa indietro e guardare in alto 6. Abbassare delicatamente la palpebra inferiore e spremere una goccia di Xailin Gel nella fessura tra l'occhio e la palpebra 7. Chiudere e riaprire l'occhio un paio di volte 8. Se non è stato centrato l'occhio, inserire un'altra goccia 9. Eliminare accuratamente qualsiasi eccedenza di Xailin Gel intorno alla palpebra con un fazzoletto. 10. Ripetere il procedimento per l'altro occhio, se necessario 11. Rimettere il tappo esterno sul contenitore, cercando di non toccare la punta applicatore con alcun corpo estraneo, compresi l'occhio o le dita 12. Lasciare trascorrere almeno 30 minuti tra una somministrazione e l'altra di altri farmaci oftalmici. In caso di dubbi sull'utilizzo di Xailin Gel, o se il fastidio persiste, consultare il proprio medico curante, il farmacista o l'ottico. Precauzioni e avvertenze - Non utilizzare se l'anello di sicurezza sul tappo del tubo è rotto - Non usare in caso di allergia al prodotto - Non toccare la punta del tubo con l'occhio o con qualsiasi altra superficie - Non condividere Xailin Gel con altre persone - Xailin Gel può causare una momentanea sensazione di lieve bruciore e/o offuscamento della visione dopo l'applicazione. Attendere che la visione sia chiara prima di guidare o usare macchinari - Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione stampigliata sul bordo del tubo - Conservare tra 1 e 25°C - Eliminare il contenuto 28 giorni dopo la prima apertura - Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini - Solo per uso oftalmico esterno, non ingerire - Consultare il proprio medico, farmacista o ottico prima di usare Xailin Gel in caso di gravidanza o allattamento al seno - Smaltire il tubo utilizzato in base alle normative locali per la gestione dei rifiuti. Componenti Xailin Gel contiene carbomer 0,2% m/m, perborato di sodio ed eccipienti. Xailin Gel contiene un conservante a scomparsa che si trasforma in acqua e ossigeno a contatto con l'occhio, riducendo così al minimo l'irritazione che può essere causata da conservanti

tradizionali, garantendo comunque la comodità di una forma multidose. Tutto quello che si sente è la sensazione di sollievo e di freschezza del gel. Formato La confezione contiene 10 g di gel oftalmico sterile.