

XAILIN WASH SOLUZIONE STERILE OCULARE 20 FLACONCINI 5 ML MONODOSE

Marchio: XAILIN
Codice Min.: 926529468
Link: [clicca qui per acquistare](#)

Xailin Wash Dispositivo medico Classe I. Indicato per il lavaggio oculare in caso di trattamento di irritazioni superficiali delle palpebre e del globo oculare: il lavaggio oculare facilita la rimozione di corpi estranei che irritano l'occhio, come sabbia, moscerini, polvere, pollini, resti di trucco e permette di alleviare la sensazione di fastidio. Il lavaggio oculare in caso di trattamento adiuvante a una patologia infettiva, allergica o infiammatoria delle palpebre, delle congiuntive e della cornea. è L'igiene oculare quotidiana e post-operatoria (adulti e bambini). Aiuta a idratare l'occhio. Ingredienti Cloruro di sodio; acido bórico; borato di sodio; acqua di rose; acqua depurata qsp 5 ml. Modalità d'uso Da 2 a 8 lavaggi al giorno. Verificare attentamente che il flaconcino non sia già utilizzato o che non sia danneggiato. Lavarsi accuratamente le mani prima di procedere al lavaggio. Staccare poi un flaconcino monodose dalla sua coroncina e aprirlo facendo ruotare la sua parte superiore. Il lavaggio si effettua con uno spruzzo diretto premendo leggermente sul flaconcino. Si consiglia di tirare verso il basso la palpebra inferiore, guardando in alto, e poi verso in alto la palpebra superiore, guardando verso il basso, in modo da distribuire bene la soluzione su tutta la superficie oculare in modo da rimuovere il corpo estraneo che irrita l'occhio, aumentare il volume del film lacrimale e idratare i tessuti. Si consiglia di attendere 10 minuti tra un'instillazione oculare e l'altra, e di iniziare sempre con il lavaggio con la soluzione Xailin Wash salvo diversa indicazione medica. Sterilizzazione Sterilizzato con l'utilizzo di tecniche di sterilizzazione asettiche. Avvertenze Non iniettare, non inghiottire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se si utilizzano lenti a contatto, il prodotto può essere usato previa rimozione delle lenti prima di procedere al lavaggio dell'occhio. Un flaconcino monodose può essere utilizzato per il trattamento di entrambi gli occhi. Evitare di toccare l'occhio o le palpebre con la punta del flaconcino. L'efficacia di un collirio o di una pomata oftalmica può essere compromessa dalla simultanea instillazione della soluzione di lavaggio oculare. In caso di insorgenza, persistenza o peggioramento di un'irritazione o in caso di eccessiva lacrimazione o visione offuscata, interrompere l'uso della soluzione e consultare rapidamente un medico. Conservazione Non superare la data di scadenza. Eliminare il flaconcino subito dopo l'uso. Non riutilizzare un flaconcino già aperto. Questo dispositivo medico non contiene conservanti, pertanto in caso di riutilizzo si rischia di somministrare una soluzione contaminata. Prima dell'apertura, conservare i flaconcini monodose a temperatura ambiente. Formato 20 flaconcini monodose da 5 ml.